



HOVERSLING®

Split-Leg



HOVERSLING®

Repositioning Sheet

Brugsanvisning




















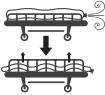






Besøg www.HoverMatt.com for andre sprog

INDHOLDSFORTEGNELSE

Symbolreference	2
Tilsligtet anvendelse og forsigtighedsregler	3
Emneidentifikation – HoverSling® Split-Leg	4
Produktspecifikationer til HoverSling® Split-Leg/påkrævet tilbehør	4
Brugsanvisning til HoverSling® Split-Leg, brugt som flyttemadras	5
Brugsanvisning til HoverSling® Split-Leg, brugt som slynge	5-6
Emneidentifikation – HoverSling® Repositioning Sheet	7
Produktspecifikationer for HoverSling® Repositioning Sheet/påkrævet tilbehør ..	7
Påsætning af HoverSling® Repositioning Sheet hægte-slyngeremme	7
Brugsanvisning til HoverSling® Repositioning Sheet, brugt som flyttemadras	8
Brugsanvisning til HoverSling® Repositioning Sheet, brugt som slynge	8-9
Brugsanvisning til HoverSling® Repositioning Sheet, brugt til siddende flytninger	10
Emneidentifikation – HT-Air® 1200-luftforsyning	11
HT-Air® 1200-luftforsyningstastaturfunktioner	11
Rengøring, forebyggende vedligeholdelse/infektionsbekæmpelse	12
Returnering og reparation	13

Symbolreference

	CE-MÆRKNING FOR OVERENSSTEMMELSE		LATEXFRI
	UK-MÆRKNING FOR OVERENSSTEMMELSE		PARTINUMMER
	AUTORISERET REPRÆSENTANT		PRODUCENT
	UK ANSVARLIG PERSON		FREMSTILLINGSDATO
	SCHWEIZ AUTORISERET REPRÆSENTANT		MEDICINSK ENHED
	FORSIGTIG / ADVARSEL		ENKELT PATIENT - ANVENDES FLERE GANGE
	IMPORTØR		MÅ IKKE VASKES
	BORTSKAFFELSE		UNIK ENHEDSIDENTIFIKATION
	BETJENINGSVEJLEDNING		PATIENTVÆGTGRÆNSE
	BRUG TO PLEJERE		HOLD DIG I NÆRHEDEN-TILGANG
	LÅS ALLE HJUL		LUK LUFTEN UD, SÆNK SENGEHESTENE
	SØRG FOR, AT PATIENTEN LIGGER FLADT		STROPLIGNENDE BØJLE
	CENTRER PATIENTEN		SÆT FORBINDELSESREM PÅ
	SPÆND PATIENTREMMENE		FODENDEN



OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Dette produkt overholder kravene i forordning om medicinsk udstyr (2017/745).
Desuden overholder dette produkt kravene i: ISO 10535

Tilsluttet anvendelse og forsigtighedsregler

TILSIGTET ANVENDELSE

HoverSling® Split-Leg og HoverSling® Repositioning Sheet er en kombination af luftunderstøttede flyttemadrasser og lyfteslynger. Under anvendelsen som en luftunderstøttet madras, puster HoverTech-luftforsyningen HoverMatt op til at beskytte og holde patienten, mens luft samtidig siver ud af huller på undersiden, hvilket nedsætter kræften, der skal bruges til at flytte patienten, med 80-90 %. I denne funktion kan HoverSling bruges til at hjælpe plejere med laterale patientflytninger, placering (herunder løft og vending), og at nedlægning. HoverSling kan også bruges uoppustet til vertikale patientløft, vending og nedlægning med en strop lignende bøjle.

INDIKATIONER

- Patienter, der ikke kan hjælpe med deres egen flytning til siden eller lodret.
- Patienter, hvis vægt eller livvidde udfører en mulig sundhedsrisiko for plejerne, der er ansvarlige for at ændre placering eller flytte disse patienter lodret eller til siden.

KONTRAINDIKATIONER

- Patienter, som oplever bryst-, hals- eller lændefrakture, som skønnes at være ustabile, bør ikke bruge HoverSling, med mindre der er truffet en klinisk beslutning af hospitalet.

TILSIGTEDE BEHANDLINGSMILJØER

- Hospitaler, langtidsfaciliteter eller faciliteter til forlænget behandling

FORHOLDSREGLER - VED BRUG SOM EN LUFTUNDERSTØTTET FLYTTEMADRAS

- Plejere skal bekræfte, at alle bremser er aktiverede før flytningen.
- Brug mindst to plejere under luftassisterede patientflytninger til siden.
- For i-sengen luftassisterede placeringsopgaver kan mere end en plejer være nødvendig. Sengeheste skal være oppe med en enkelt plejer.
- For luftassisteret nedlægning, se HoverTechs video på www.HoverMatt.com.
- Lad aldrig en patient være uden opsyn på en oppustet HoverSling.
- Anvend kun dette produkt til dets tilsigtede formål som beskrevet i denne brugervejledning.
- Brug kun påsætninger og/eller tilbehør, der er godkendt af HoverTech.
- Når en patient flyttes til en seng med lavt lufttab, skal sengemadrassens luftstrøm indstilles til det højeste niveau, for at give et fast flytteleje.
- Forsøg aldrig at flytte en patient lateralt på en HoverSling, der ikke er oppustet.
- Sørg for, at patienten er centreret på HoverSling, før den oppustes.

FORSIGTIGHEDSREGLER - LUFTFORSYNING

- Før strømledningen på en måde, der sikrer frihed for fare. Undgå

blokering af luftindtag på luftforsyningen.

- Når HoverMatt anvendes i et MR-miljø, er en særlig MR-slange på 7,62 meter (25 fod) påkrævet (kan købes).
- **FORSIGTIG:** Undgå elektrisk stød. Åbn ikke luftforsyningen.
- Læs de produktspecifikke brugsanvisninger angående betjeningsvejledninger.

FORSIGTIGHEDSREGLER - TIL BRUG SOM EN SLYNGE

- For laterale patientflytninger kan mere end en plejer være nødvendig.
- For i-sengen placeringsopgaver kan mere end en plejer være nødvendig. Sengeheste skal være oppe med en enkelt plejer.
- For nedlægning, se HoverTechs video på www.HoverMatt.com.
- HoverSling må kun anvendes af uddannet personale.
- Brug kun påsætninger og/eller tilbehør, der er godkendt af HoverTech.
- Før brug skal en risikovurdering gøres for at sikre, at den korrekte størrelse HoverSling bruges til patienten.
- En klinisk vurdering skal udføres af en kvalificeret sygeplejerske eller læge inden patienter løftes med HoverSling.
- Brug ikke HoverSling Split-Leg sideflyttehåndtag til at løfte. Overdreven belastning på sideflyttehåndtagene kan forårsage at HoverSling revner.
- Sørg for, at HoverSling ikke er påsat nogen genstande udover den strop lignende bøjle.
- Når den strop lignende bøjle forbindes, sørg for at skulderremmenes stropfarver matcher på patientens venstre og højre side, og benremmenes stropfarver på patientens venstre og højre side.
- Når slyngens hjælperemme er helt udstrakte, sørg for at de er ordentligt fastgjorte til bøjlen, før patienten løftes.
- Ved siddende løft, sørg for at patienten sidder sikkert i HoverSling® før der flyttes eller løftes.
- Løft aldrig en patient højere end nødvendigt til at udføre løftet/flytningen.
- Lad aldrig patienten være uden opsyn, når HoverSling anvendes.
- Anvend HoverSling i overensstemmelse med både løfteanvisningerne og HoverSling's brugervejledning.
- Hvis vægtgrænsen afviger mellem patientløfter, bøjle og HoverSling, så er det den laveste vægtgrænse, der gælder.



Hvis der er nogen tegn på skader, skal HoverSling tages ud af brug og bortskaffes.




Sengeheste skal være oppe med en enkelt plejer.



På operationsstuen – for at forhindre, at patienten glider, skal luften altid lukkes ud af HoverSling, og patienten og HoverSling skal fastgøres til operationsbordet, før bordet flyttes i vinkelstilling.

Emneidentifikation – HoverSling® Split-Leg

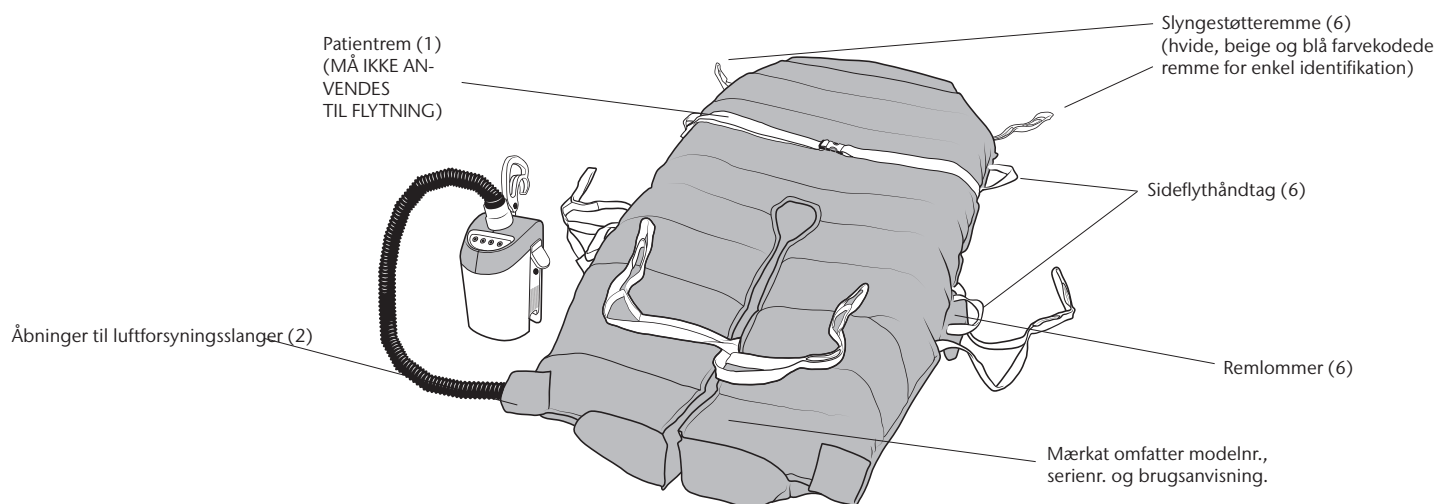

Produktspecifikationer/påkrævet tilbehør

HOVERSLING® SPLIT-LEG

Materiale:	Overdel: Polyesterstrik Underdel: Nylontwill
Udformning:	Syet
Bredde:	34" (86 cm)
Længde:	70" (178 cm)

Modelnr.: HMSLING-34-B* – 34" W x 70" L (10 pr. kasse)



VÆGTGRÆNSE 318 KG / 700 LBS

*Åndbar model

PÅKRÆVET TILBEHØR TIL BRUG SOM EN FLYTTEMADRAS:

Modelnr.: HTAIR1200 (nordamerikansk version) – 120 V~, 60 Hz, 10 A
Modelnr.: HTAIR2300 (europæisk version) – 230 V~, 50 Hz, 6 A
Modelnr.: HTAIR1000 (japansk version) – 100 V~, 50/60 Hz, 12,5 A
Modelnr.: HTAIR2356 (koreansk version) – 230 V~, 50/60 Hz, 6 A
Modelnr.: AIR200G (800 W) – 120 V~, 60 Hz, 10 A
Modelnr.: AIR400G (1100 W) – 120 V~, 60 Hz, 10 A

PÅKRÆVET TILBEHØR TIL BRUG SOM EN SLYNGE:

Et patientløft med 2-, 3- eller 4-punkts stroplignende bøjler beregnet til brug med:

- Mobile hejser med slyngesæder
- Hejsevogne
- Stationære hejser fastgjort til væggen/væggene, gulvet og/eller loftet
- Stationære fritstående hejser

Brugsanvisning til HoverSling® Split-Leg, brugt som flyttemadras

1. Sørg for at slyngestøtteremmen opbevares i remlommerne, og at de fire (4) spændere, placeret på de centrale ben og fod-sektioner er forbundne.
2. Patienten skal helst ligge på ryggen.
3. Placer HoverSling Split-Leg under patienten ved hjælp af rulle teknik og spænd patientsikkerhedsremmene løst.
4. Sæt HoverTech-luftforsyningens ledning i en stikkontakt.
5. Sæt slangedysen i en af de to slangeindgange i fodenden af HoverSling Split-Leg og skub den på plads.
6. Sørg for, at flyttelejerne er så tætte på hinanden som muligt, og lås alle hjul.
7. Hvis det er muligt, flyt fra et højere leje til et lavere leje.
8. Tænd for HoverTech-luftforsyningen.
9. Skub den oppustede HoverSling Split-Leg i en vinkel, enten hoved først eller fødder først. Når halvvejs, skal den modsatte plejer tage fat i de nærmeste håndtag og trække den i den ønskede position.
10. Sørg for, at patienten er på modtagerudstyret før luften lukkes ud.
11. Sluk for luftforsyningen og løft sengens/bårens sengeheste. Spænd patientremmen op.

Brugsanvisning til HoverSling® Split-Leg, brugt som slynge

BRUGSANVISNING - PATIENT I SENG

Bemærk: HoverSling Split-Leg har seks (6) slyngestøtteremme, som skal være forbundne.




1. **Mulighed 1** – Placer HoverSling Split-Leg under patienten ved hjælp af rulle teknik med spidsen af slyngens hestesko ved patientens haleben. Løft sengens hovedgærde.


Mulighed 2 – Løft sengens hovedgærde. Læn patienten fremad og glid slyngen bagom patientens ryg, indtil spidsen af hesteskoen når patientens haleben. Få patienten til at læne sig tilbage for at holde slyngen på plads.



3. Åbn de indvendige båndspændere. Kryds indvendige benstøtteremme ved at tage en benstøtterem og føre den over til den anden, på den anden side. Forbind indvendige benstøtter til bøjlen.

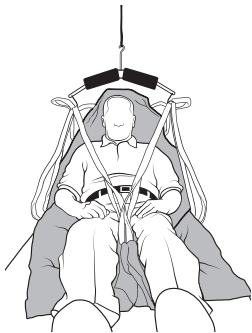


2. Fastgør skulderremmene til bøjlen for korrekt sikkerhed og komfort for patienten. [Farvekodede remstroppe giver enkel identifikation til at matche remplace-ring på venstre og højre side af patienten. Kortere remstroppe ved skulderen (blå / beige) medfører en mere opret siddestilling, mens længere skulder- og benremme (hvide) øger tilbagelæningsvinklen og reducerer hoftens bøjning].

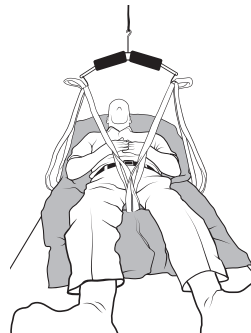


4. Forbind udvendige benstøtteremme til bøjlen


BRUGSANVISNING - TILBAGE I SENG

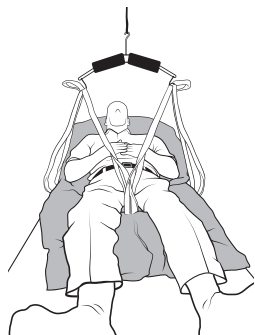

1. Placer patienten over midten af sengen. Løft hovedgærdet og sænk patienten ned på sengen.

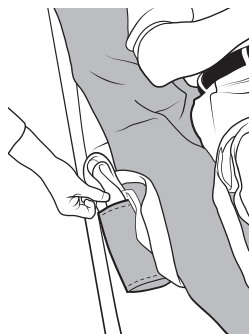


3. Læg slyngestøtteremmen tilbage i remlommerne på inderside- og ydersidekanterne af HoverSling Split-Leg.

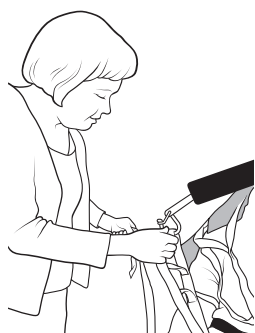


2. Fjern remstropperne fra bøjljen.


BRUGSANVISNING - PATIENT PÅ STOL

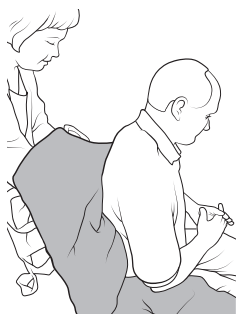


1. Åbn bensepænderne. Læn patienten fremad. Før spidsen af slyngens hestesko bagom patienten indtil du rører sædet, hvilket sikrer, at slyngen er centreret på patientens torso. Få patienten til at læne sig tilbage mod slyngen for at holde den på plads.

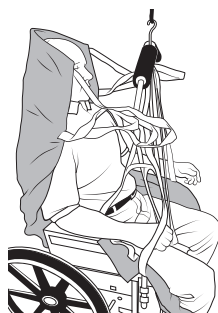

3. Fastgør skulderremmen til bøjljen for korrekt sikkerhed og komfort for patienten. [Farvekodede remstropper giver enkel identifikation til at matche remplacement på venstre og højre side af patienten. Kortere remstropper ved skulderen (blå / beige) medfører en mere opret siddestilling, mens længere skulder- og benremme (hvide) øger tilbagelæningsvinklen og reducerer hoftens bøjning].

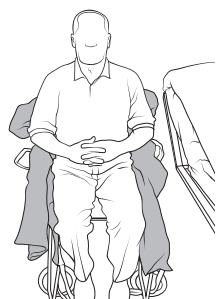


2. Læg bensektionerne langs med siden af hofter og ben, og læg derefter hver bensektion under hver sit ben.

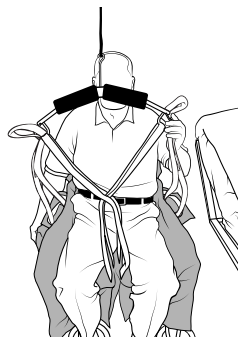

4. Kryds indvendige benstøtteremme ved at tage en benstøtterem og føre den over til den anden, på den anden side. Fastgør indvendige og udvendige benstøtteremme til bøjljen.

Emneidentifikation – HoverSling® Repositioning Sheet

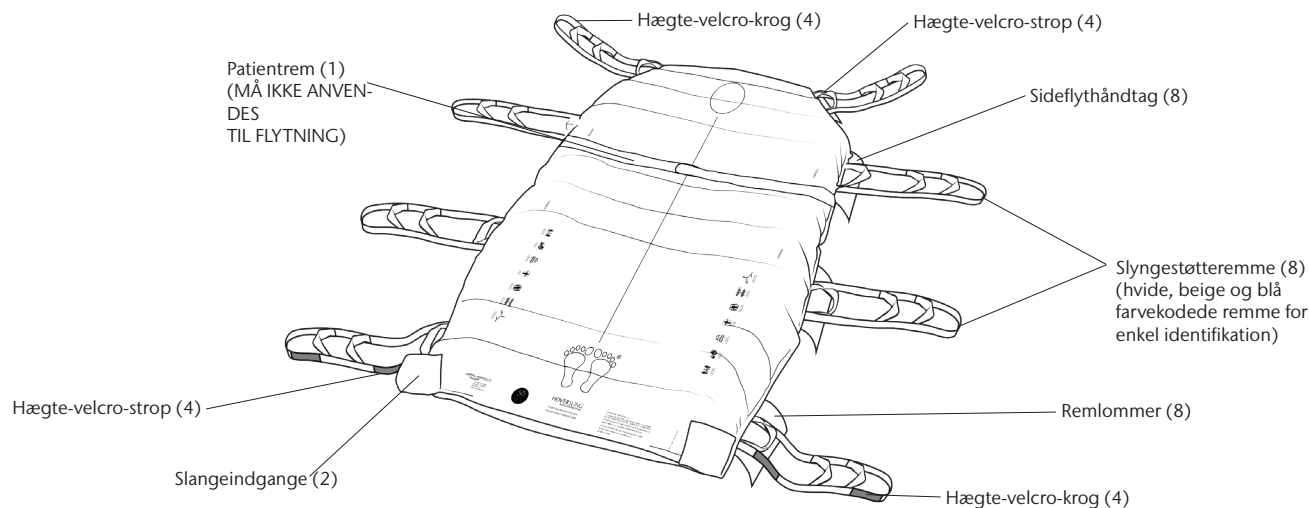

Produktspecifikationer/påkrævet tilbehør

HOVERSLING® REPOSITIONING SHEET

Materiale:	Overdel: Polyesterstrikk Underdel: Nylontwill
Udformning:	Syet
Bredde:	39" (99 cm) 50" (127 cm)
Længde:	78" (198 cm)

Modelnr.: HMSLING-39RS-B – 39" W x 78" L (5 pr. kasse)*
Modelnr.: HMSLING-50RS-B – 50" W x 78" L (5 pr. kasse)*
Modelnr.: HMSLING-39RS-TVA-B – 39" W x 78" L (5 pr. kasse)*
Modelnr.: HMSLING-50RS-TVA-B – 50" W x 78" L (5 pr. kasse)*



VÆGTGRÆNSE 454 KG / 1.000 LBS

*Åndbar model

PÅKRÆVET TILBEHØR TIL BRUG SOM EN FLYTTEMADRAS:

Modelnr.: HTAIR1200 (nordamerikansk version) – 120 V~, 60 Hz, 10 A
Modelnr.: HTAIR2300 (europæisk version) – 230 V~, 50 Hz, 6 A
Modelnr.: HTAIR1000 (japansk version) – 100 V~, 50/60 Hz, 12,5 A
Modelnr.: HTAIR2356 (koreansk version) – 230 V~, 50/60 Hz, 6 A
Modelnr.: AIR200G (800 W) – 120 V~, 60 Hz, 10 A
Modelnr.: AIR400G (1100 W) – 120 V~, 60 Hz, 10 A

PÅKRÆVET TILBEHØR TIL BRUG SOM EN SLYNGE:

Et patientløft med 2-, 3- eller 4-punkts stroplignende bøjler beregnet til brug med:

- Mobile hejser
- Hejsevogne
- Stationære hejser fastgjort til væggen/væggene, gulvet og/eller loftet
- Stationære fritstående hejser

Påsætning af HoverSling® Repositioning Sheet hægte-slyngeremme

1. Tråd en ende af HoverSling hægte-slyngeremmen gennem en del af sengestellet (hovedgærdet eller sengeheste kan bruges*) øverst på sengen.
2. Fæst krogen af velcro-slyngeremmen til velcro-stroppen og fastgør den.
3. Gentag processen på den modsatte side af sengen.
4. Ved hjælp af den samme metode, fæst velcro-slyngeremmen i foden af sengen.

*alt efter sengetype og hospitalets regler.

Bemærk: Sørg for at fjerne hægte-slyngeremmen før patienten flyttes.

Opbevar slyngeremmen i sidelommerne, når de ikke er i brug.

Brugsanvisning til HoverSling® Repositioning Sheet, brugt som flyttemadras

1. Sørg for at slyngestøtteremmen opbevares i remlommerne.
2. Patienten skal helst ligge på ryggen.
3. Placer HoverSling Repositioning Sheet under patienten ved hjælp af rulle teknik og spænd patientsikkerhedsremmen løst.
4. Sæt HoverTech-luftforsyningens ledning i en stikkontakt.
5. Sæt slangedysen i en af de to slangeindgange i fodenden af HoverSling Repositioning Sheet og skub den på plads.
6. Sørg for, at flyttelejerne er så tætte på hinanden som muligt, og lås alle hjul.
7. Hvis det er muligt, flyt fra et højere leje til et lavere leje.
8. Tænd for HoverTech-luftforsyningen.
9. Skub den oppustede HoverSling Repositioning Sheet i en vinkel, enten hovedet først eller fødderne først. Når halvvejs, skal den modsatte plejer tage fat i de nærmeste håndtag og trække den i den ønskede position.
10. Sørg for, at patienten er på modtagerudstyret før luften lukkes ud.
11. Sluk for luftforsyningen og løft sengens/bårens sengeheste. Spænd patientremmen op.

BEMÆRK: To luftforsyninger kan anvendes til oppustning, når 50" HoverSling® Repositioning Sheet anvendes.


Brugsanvisning til HoverSling® Repositioning Sheet, brugt som slynge

BRUGSANVISNING - PATIENT I SENG

Bemærk: HoverSling® Repositioning Sheet har otte (8) slyngestøtteremme, som skal fastgøres.




1. Placer HoverSling Repositioning Sheet under patienten ved hjælp af rulle teknik.

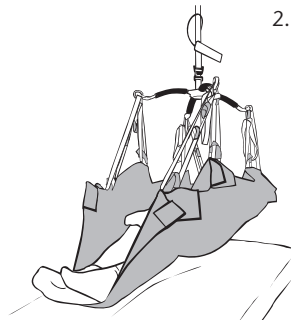

2. Fastgør skulderremmen til bøjlen for korrekt sikkerhed og komfort for patienten. [Farvekodede remstropper giver enkel identifikation til at matche remplacering på venstre og højre side af patienten]. Løft patienten i henhold til lift-producentens vejledning.

BRUGSANVISNING - TILBAGE I SENG

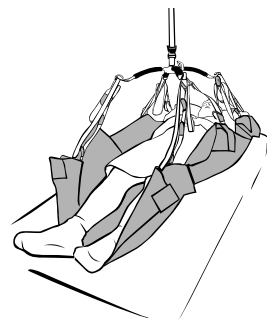

1. Placer patienten over midten af sengen. Sænk patienten ned på sengen.




3. Læg slyngestøtteremmen tilbage i remlommerne på inderside- og ydersidekanterne af HoverSling Repositioning Sheet.

2. Fjern remstropperne fra bøjlen.




HOVERSLING® Brugsanvisning

BRUGSANVISNING - LATERAL VENDING/NEDLÆGNING

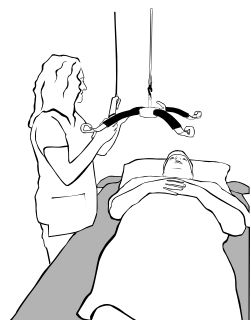


1. Med patienten centreret på HoverSling® Repositioning Sheet, sænk bøjlen til en komfortabel arbejds højde.

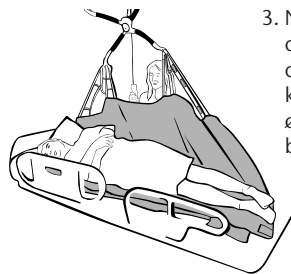


3. Når liften løftes vil patienten vende mod den modsatte side af sengen i forhold til den, som remmene er fastgjort til. Brug kiler for at holde patienten i stillingen, om ønsket. Efter at opgaven er fuldført, sænk bøjlen og fjern slyngeremmen.

* For at lægge ned, fortsæt vendingen og juster patient/enhed efter behov, efter at opgaven er fuldført.

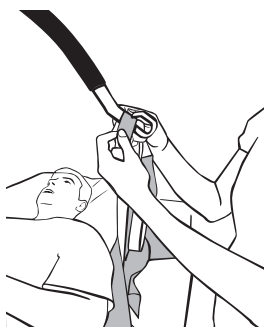

2. Løft sengehestene og fastgør alle fire (4) remme på den modsatte side af patienten, vend mod stropper på samme side af bøjlen startende i fodenden.


BRUGSANVISNING - HYGIEJNEVENDING

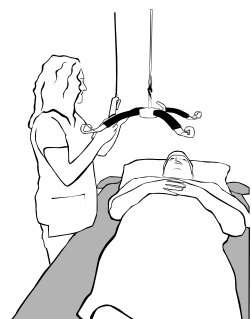

1. Med patienten centreret på HoverSling® Repositioning Sheet, sænk bøjlen til en komfortabel arbejds højde.



3. Når liften løftes, vil patienten begynde at dreje mod siden modsat den forbundne rem. Lad slyngen være for at udføre opgaven. Efter at opgaven er fuldført, sænk bøjlen og fjern slyngeremmen.

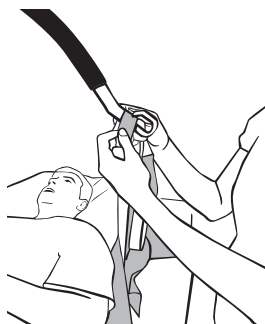


2. Løft sengehestene og fastgør slyngeremmen, som er nærmest patientens skulder, til bøjlen.

HOVERSLING® Brugsanvisning


BRUGSANVISNING - SIDDENDE FLYTNING FRA SENGEN




1. Placer HoverSling Repositioning Sheet under patienten ved hjælp af rulle-teknikken. Hæv hovedenden af sengen for at forberede den siddende flytning.

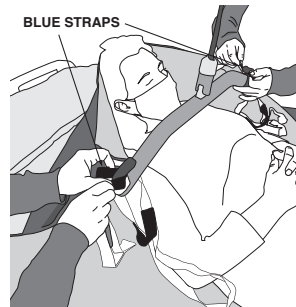

3. Fastgør den blå slyngerem på hver skulderside (for både 39" og 50").

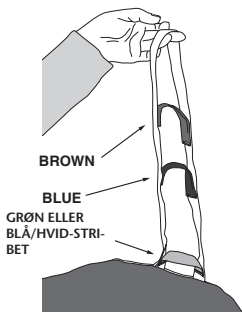

2. Fastgør remmene ved hovedenden af HoverSling til bøjlen. For en helt opret siddestilling - brug flyttehåndtaget (grønt for 39" og blå/hvid-stribet for 50"). For en tilbagelænet siddestilling - brug den første slyngerem (blå for både 39" og 50") for at reducere hoftebøjningen.

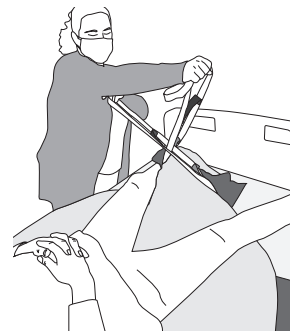


4. Fold HoverSling mellem patientens ben og placer fødderne på hver side af HoverSling. Kryds en fodende-slyngerem gennem den anden på den laveste strop, nærmest enheden, og fastgør den til bøjlen. Flyt patienten.


BRUGSANVISNING - SIDDENDE FLYTNING FRA STOL



1. Sørg for, at HoverSling er korrekt placeret under patienten inden remmen fastgøres.

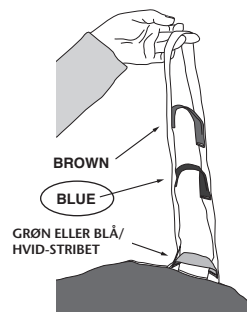

3. Fastgør den blå slyngerem på hver skulderside (for både 39" og 50"). Sørg for at der er masser af ekstra plads i bøjlen til at fastgøre fodende-remmene uden at skubbe patienten af stolen.

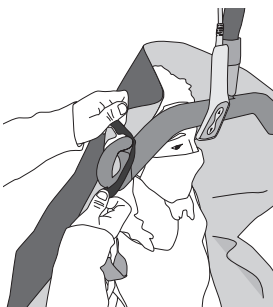


2. Fastgør remmene ved hovedenden af HoverSling til bøjlen. For en helt opret siddestilling - brug flyttehåndtaget (grønt for 39" og blå/hvid-stribet for 50"). For en tilbagelænet siddestilling - brug den første slyngerem (blå for både 39" og 50") for at reducere hoftebøjningen.




4. Fold HoverSling mellem patientens ben og placer fødderne på hver side af HoverSling. Kryds en fodende-slyngerem gennem den anden på den laveste strop, nærmest enheden, og fastgør den til bøjlen. Flyt patienten.

Emneidentifikation – HT-Air®-luftforsyning

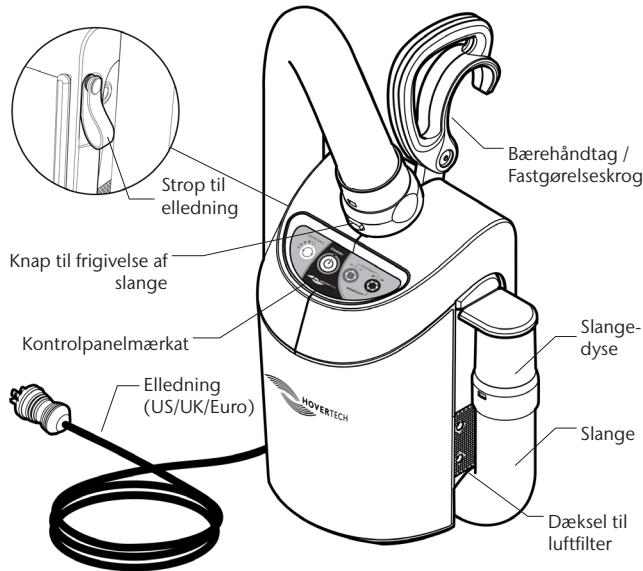

ADVARSEL: HT-Air er ikke kompatibel med jævnstrømsforsyninger.
HT-Air må ikke anvendes med HoverJack-batterivognen.

HT-Air®-tastaturfunktioner

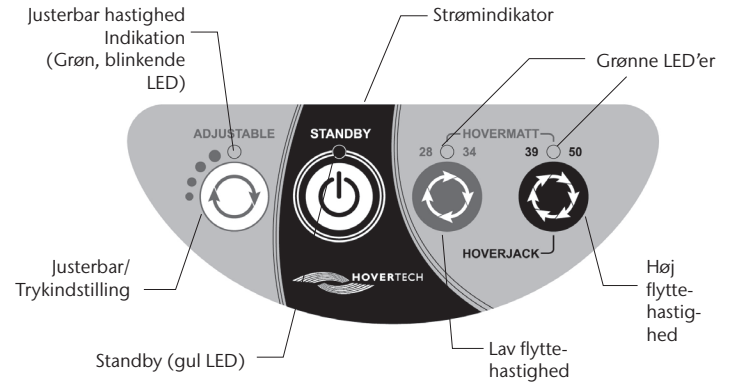

JUSTERBAR: Til brug med HoverTech luftassisterede place-ringsudstyr. Der er fire forskellige indstillinger. Hvert tryk på knappen øger lufttrykket og -hastigheden på oppustningen. Den grønne, blinkende LED angiver oppustningshastigheden med det antal blink (dvs. to blink svarer til den anden oppustningshastighed).

Alle indstillingerne i det JUSTERBARE område er væsentligt lavere end HoverMatt- og HoverJack-indstillingerne. Den JUSTERBARE funktion må ikke anvendes til flytning.

Den JUSTERBARE indstilling er en sikkerhedsfunktion, der kan anvendes til at sikre, at patienten er centreret på det HoverTech luftassisterede udstyr og til langsomt at vænne en patient, som er angst eller har smerter til både lyden og funktionaliteten af det oppustede udstyr.



STANDBY: Anvendes til at stoppe oppustning/luftstrøm (gul LED angiver STANDBY-tilstanden).



HOVERMATT 28/34: Til brug med 28" og 34" HoverMatt og HoverSling.



HOVERMATT 39/50 og HoverJack: Til brug med 39" og 50" HoverMatt og HoverSling og 32" og 39" HoverJack.

Air200G/Air400G-luftforsyning

Hvis HoverTechs Air200G eller Air400G luftforsyninger anvendes, tryk på den grå knap på toppen af beholderen for at starte luftstrømmen. Tryk på knappen igen for at stoppe luftstrømmen.

Rengøring

For at hjælpe til at holde HoverSling ren anbefaler HoverTech brugen af HoverCover™ eller deres Disposable Sheets. Hvad end patienten ligger på for at holde hospitalssengen ren kan også lægges oven på HoverSling. HoverSling er til en enkelt patients brug og er ikke beregnet til at blive vasket. Kassér enheden, hvis den bliver groft tilsmudset.

FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE

HoverSling skal kontrolleres før hvert brug for at sikre, at der ikke er nogen skade, som kunne betyde, at den ikke fungerer som tiltænkt. Den skal have alle sikkerhedsremme, og slyngestøtteremme og håndtag skal være intakte. Må ikke vaskes-mærkatet ("Do Not Launder") skal være intakt. Der må ikke være revner, huller eller løse tråde. Hvis en sådan skade findes, skal HoverSling kasseres. HoverSling er beregnet til brug under hele patientens ophold på hospitalet/plejehjemmet. Hvis opholdet overskrider tre måneder, skal HoverSling skiftes.

INFEKTIONSBEKÆMPELSE

Hvis HoverSling er brugt på en isolationspatient, skal hospitalet bruge samme regler/procedurer, som det bruger til bortskaffelse af andre kontaminerede enheder til en enkelt patients brug.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF LUFTFORSYNINGEN

Se brugsanvisningen til luftforsyningen.



Når et produkt når til slutningen af dets levetid, skal det opdeles efter materialetyper, så delene kan genbruges eller bortskaffes korrekt, med overholdelse af lokale krav.

Transport og opbevaring

Dette produkt kræver ingen specielle opbevaringsforhold.

Returnering og reparation

Alle produkter, der returneres til HoverTech, skal have et RGA (returvaregodkendelse)-nummer, der er udstedt af virksomheden.

Ring til (800) 471-2776 og spørg efter et medlem af RGA-holdet, som vil udstede et RGA-nummer. Hvis et produkt returneres uden et RGA-nummer, vil det forårsage forsinkelse i reparationstiden.

Returnerede produkter skal sendes til:

HoverTech
Attn: RGA # _____
4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

Europæiske virksomheder skal sende returnerede produkter til:



Attn: RGA # _____
Kista Science Tower
SE-164 51 Kista, Sverige

For produktgarantier, besøg vores website:

<https://hovermatt.com/standard-product-warranty/>



HoverTech

4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

www.HoverMatt.com
Info@HoverMatt.com

Dette produkt overholder de relevante standarder for klasse 1-produkter i forordning om medicinsk udstyr (2017/745) om medicinske enheder.



CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13,
3951DB MAARN, NEDERLANDENE.

www.cepartner4u.com



Etac Ltd.

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

www.etac.com/uk



TapMed Swiss AG

Gumprechtstrasse 33
CH-6376 Emmetten
CHRN-AR-20003070

www.tapmed-swiss.ch

I tilfælde af en uønsket hændelse i forhold til enheden skal hændelser rapporteres to vores autoriserede repræsentant. Vores autoriserede repræsentant videregiver oplysninger til producenten.



4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

800.471.2776
Fax 610.694.9601

www.HoverMatt.com
Info@HoverMatt.com