



AIRWEDGE®

Adjustable Positioning Device

Användarhandbok

Besök www.HoverMatt.com för andra språk

INNEHÅLL

Symbolreferens	2
Avsedd användning och försiktighetsåtgärder.....	2
Identifiering av delar	
– AirWedge® Adjustable Positioning Device.....	3
Identifiering av delar – HT-Air® Air Supply	3
HT-Air®-knappsatsfunktioner	3
Bruksanvisning	4
Produktspecifikationer/tillbehör som krävs	4
Rengöring och förebyggande underhåll	5

Symbolreferens



FÖRSÄKRAN OM ÖVERENS-
STÄMMELSE MED DIREKTIVET OM
MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

Dessa produkter uppfyller de standarder som gäller för klass 1-produkter i förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.

Avsedd användning och försiktighetsåtgärder

AVSEDD ANVÄNDNING

AirWedge® Adjustable Positioning Device används för att pneumatiskt lyfta och positionera huvud och bröst på en patient som ligger i ryggläge utan manuella lyft. Den kan även användas för att höja upp ben, fötter osv.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Patienter som inte kan positionera sig själva inför ingrepp eller allmän patientvård

KONTRAINDIKATIONER

Patienter med thoraxfrakturer, cervikala frakturer eller lumbalfrakturer som bedöms vara instabila.

AVSEDDA VÅRDMILJÖER

Sjukhus, långtidsvård eller äldreomsorg

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER – AIRWEDGE


- Kontrollera att AirWedge uppfyller patientens behov före användning.
- En klinisk bedömning ska utföras av kvalificerad medicinsk personal innan patienten positioneras med hjälp av AirWedge.
- Se till att patienten är centrerad på luftkudden innan du blåser upp den.
- Vårdpersonal måste se till att patienten vårdas och stabiliseras medan han/hon ligger på AirWedge.
- Minst två vårdgivare ska alltid arbeta med AirWedge.
- Produkten får endast användas av utbildad personal.
- Använd endast tillbehör som godkänts av HoverTech International.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER


– HOVERTECH INTERNATIONAL AIR SUPPLY

- Får inte användas i närheten av lättantändliga anestetika eller i tryckkammare eller syrgastält.
- Dra strömkabeln på ett sådant sätt att den inte löper risk att skadas.
- Undvik att blockera luftintagen i Air Supply.
- Använd endast produkten för det ändamål som beskrivs i denna handbok.
- VARNING: Undvik elstöt. Öppna inte HoverTech International Air Supply.
- VARNING: Se de produktspecifika användarhandböckerna för användningsanvisningar.

Identifiering av delar – AirWedge® Adjustable Positioning Device

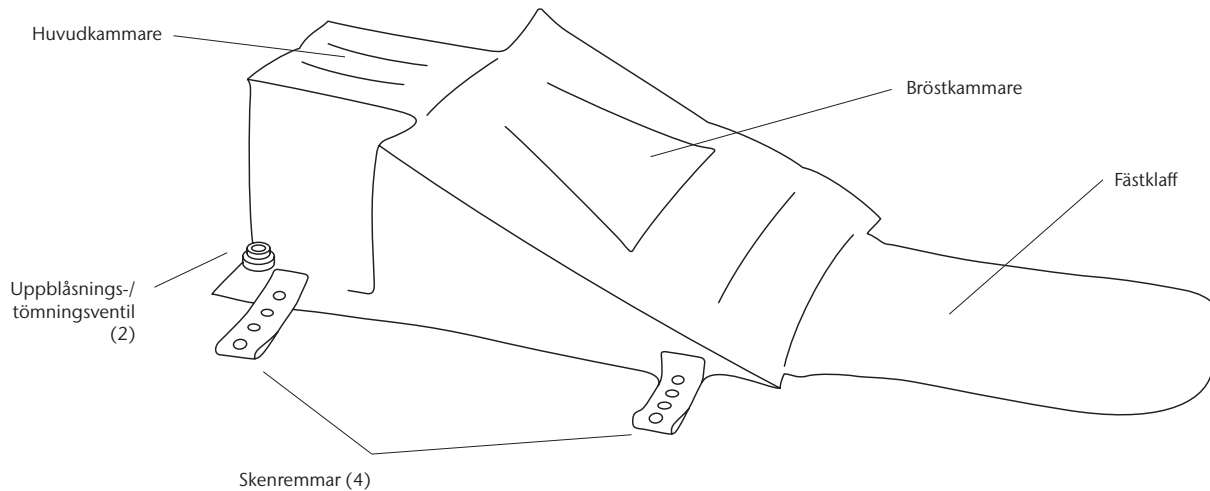


Identifiering av delar – HT-Air® Air Supply

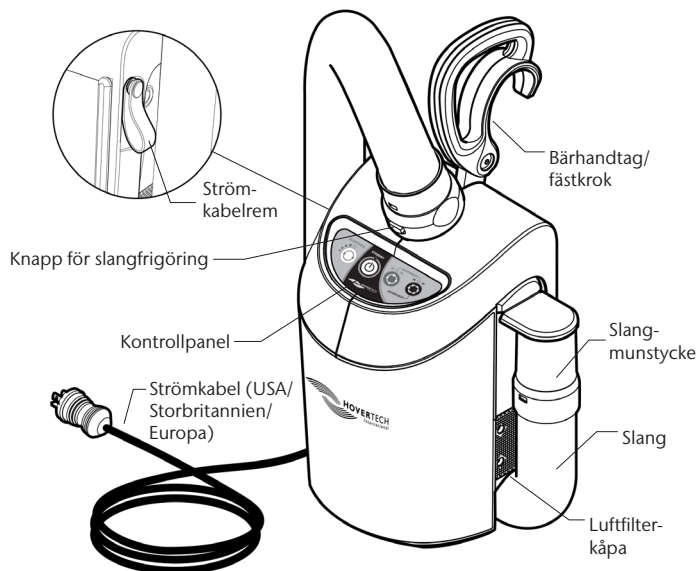

WARNING: HT-Air kan inte användas med likströmsförsörjning.

HT-Air®-knappsatsfunktioner

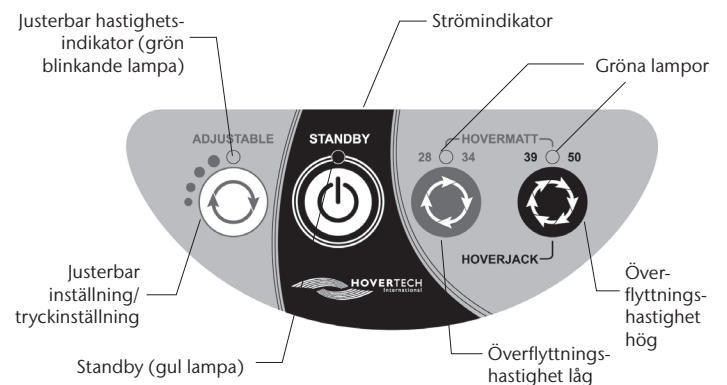

Knappen ADJUSTABLE har fyra olika inställningar. Varje tryck på knappen ökar lufttrycket och upplåsningshastigheten. Den gröna blinkande lampan indikerar upplåsningshastigheten genom antalet blinkningar (dvs. två blinkningar motsvarar upplåsningshastighet 2).



STANDBY: Används för att stoppa upplåsning/luftflöde (gul lampa indikerar STANDBY-läge).

Bruksanvisning

1. Centrera AirWedge på ytan där den ska användas och säkra med skenremmarna.
2. Vid höjning av huvud och bröst ska patienten centreras på AirWedge, med patientens huvud nära kuddens överkant. (AirWedge kan även användas för att höja upp ben, fötter osv. För dessa och andra användningstillämpningar, placera AirWedge på lämpligt sätt och följ uppblåsningssproceduren.)
3. Starta uppblåsningen genom att hålla Air Supply-slangen HT-Air mot huvuduppblåsningsventilen. Tryck på knappen ADJUSTABLE på HT-Air-knappsatsen för att initiera luftflödet och välja lämplig hastighet. Blås upp huvudkudden delvis. Flytta slangen till bröstuppblåsningsventilen och blås upp till önskad höjd. Avsluta sedan uppblåsningen av huvudkudden efter behov.
4. Du kan minska fastheten genom att trycka på membranet i varje uppblåsningsventil och långsamt tömma kammaren.
5. När proceduren är klar tömmer du AirWedge genom att trycka på membranet i varje uppblåsningsventil tills båda kamrarna är helt tomma på luft.

Produktspecifikationer/tillbehör som krävs

AIRWEDGE ADJUSTABLE POSITIONING DEVICE

Material:	Dubbelbelagd polyuretan-nylonväv
Konstruktion:	RF-svetsad
Bredd:	56 cm (22") (ej uppblåst)
Längd:	76 cm (30") (uppblåst)

Modellnr: HTPP-200

Viktgräns: 363 kg

TILLBEHÖR SOM KRÄVS:

Modellnr: HTAIR2300 (europeisk version) – 230 V ~, 50 Hz, 6 A

LATEXFRI

Rengöring och förebyggande underhåll

Tvätta inte AirWedge.

Mellan patientanvändningarna ska AirWedge torkas av med en rengöringslösning som används av sjukhuset för desinficering av medicinsk utrustning. En 10:1 blekmedelslösning (10 delar vatten:1 del blekmedel) eller desinficerande våtservetter kan också användas. Det är viktigt att följa rengöringsmedelstillverkarens instruktioner, inklusive anvisningar om användningstid och spädning.

OBS! Rengöring med blekmedel kan missfärga tyget.

INFEKTIONSKONTROLL

Oavsett vad patienten ligger på för att hålla ytan ren kan detta föremål placeras ovanpå AirWedge för att hålla enheten ren. Om så önskas kan ett engångslakan användas för att täcka över AirWedge (finns att köpa separat).

Om AirWedge används på en isolerad patient ska sjukhuset använda samma protokoll/rutiner som används för sängmadrassen och/eller för sängkläderna i det aktuella patientrummet.

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Före användning ska en visuell inspektion utföras på AirWedge för att säkerställa att det inte finns några synliga skador som kan göra AirWedge obrukbar.


AirWedge ska inspekteras regelbundet för att säkerställa följande:

- Alla uppblåsnings-/tömningsventiler är självtätande utan tecken på läckage.
- Alla skenremmar är fästa vid AirWedge.
- Alla tryckknappar är intakta och fungerar.
- Det finns inga punkteringar eller revor i AirWedge.

Om du upptäcker skador som skulle göra att AirWedge inte fungerar som avsett ska AirWedge tas ur bruk och returneras till HoverTech International för reparation.

HoverTech-symboler

 CE-MÄRKNING OM ÖVERENSSTÄMMELSE

 EN PATIENT – FLERA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

 FÖRSIKTIGHET

 ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING

 BRUKSANVISNING

 UNIK ENHETSIDENTIFIKATION

 MEDICINTEKNISK PRODUKT

 FÖRVARAS TORRT

 BEGRÄNSNING AV FUKTIGHET

 TEMPERATURGRÄNS

 AUKTORISERAD REPRESENTANT

 TILLVERKARE

 SERIENUMMER

 LOT-NUMMER

 HoverTech International
4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109, USA
www.HoverMatt.com
Info@hovermatt.com

Dessa produkter uppfyller de standarder som gäller för klass 1-produkter i förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.

 CEpartner4U, ESDOORNLAAN
13, 3951DB MAARN,
NEDERLÄNDERNA.
www.cepartner4u.com

Vid önskad incident i samband med enheten ska incidenterna rapporteras till vår auktoriserade representant, CEPartner4u. CEPartner4u vidarebefordrar informationen till tillverkaren.

EU-importör:
Etac AB
Färögatan 33
164 51 Kista www.etac.com

För returer och reparationer, kontakta din lokala återförsäljare/distributör:

Hitta kontaktuppgifter för Europa:
www.etac.com