



Q2ROLLER®

Lateral Turning Device

Brukerhåndbok

Besøk www.HoverMatt.com for informasjon på andre språk

INNHOLD

Bruksområde og forholdsregler.....	2
Identifikasjon av deler – Q2Roller	2
Identifikasjon av deler – Air Supply.....	2
Tastefunksjoner for Air Supply	3
Bruksanvisning	3
Produktspesifikasjoner/nødvendig tilbehør	3
Rengjøring og vedlikehold	4

Bruksområde og forholdsregler

BRUKSINDIKASJONER

Pasienter som ikke er i stand til å snu seg over på siden.

KONTRAINDIKASJONER

Pasienter som har torakal, cervikal eller lumbal fraktur som betraktes som ustabil.

TILTENKTE BRUKSOMRÅDER

Sykehus, langsiktig eller utvidet pleie på institusjon.

FORHOLDSREGLER


- Kontroller at Q2Roller dekker pasientens behov før bruk.
- Det skal alltid delta minst to pleiere når Q2Roller brukes.
- Sørg for at ventilene ikke er i kontakt med pasienten mens han/hun er på Q2Roller.
- Produktet må bare brukes av opplært personell.
- Bruk bare tilbehør og/eller ekstrautstyr som er godkjent av HoverTech International.

- Bruk Q2Roller i henhold til instruksjonene.
- Kun for bruk med Adjustable-knappen på HT-Air.
- Sørg for at pasienten er sentrert på Q2Roller før oppblåsing. Midtlinjeangivelse på Q2Roller.
- Pleierne må passe på pasienten og sørge for at han/hun er stabilisert når Q2Roller blåses opp, tømmes for luft eller når den er blåst opp til en vinkel på over 30 grader.
- Kan ikke vaskes i maskin.
- Se produktspesifikke brukerhåndbøker for ytterligere bruksanvisninger.


FORHOLDSREGLER – HOVERTECH INTERNATIONAL AIR SUPPLY

- Legg strømledningen slik at den ikke utgjør noen fare.
- Unngå å blokkere luftinntakene til Air Supply.
- Bruk dette produktet kun til det tiltenkte formålet, slik det er beskrevet i denne håndboken.
- FORSIKTIG: Unngå elektrisk støt. Air Supply må ikke åpnes.

Identifikasjon av deler – Q2Roller

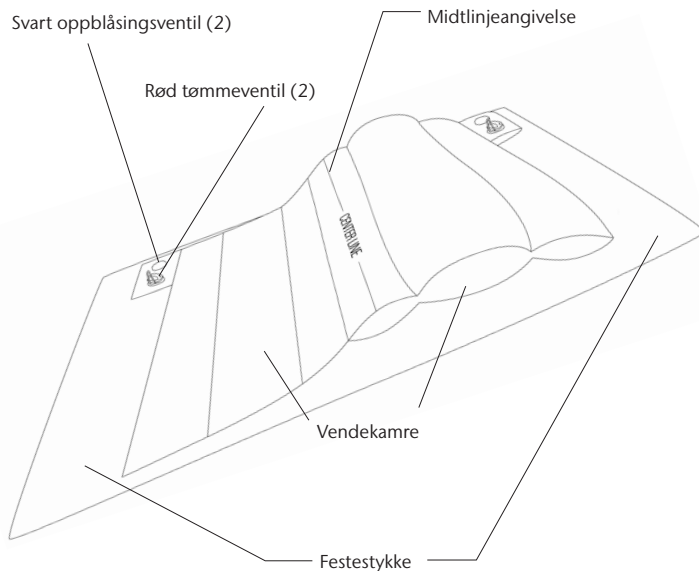


Identifikasjon av deler – Air Supply

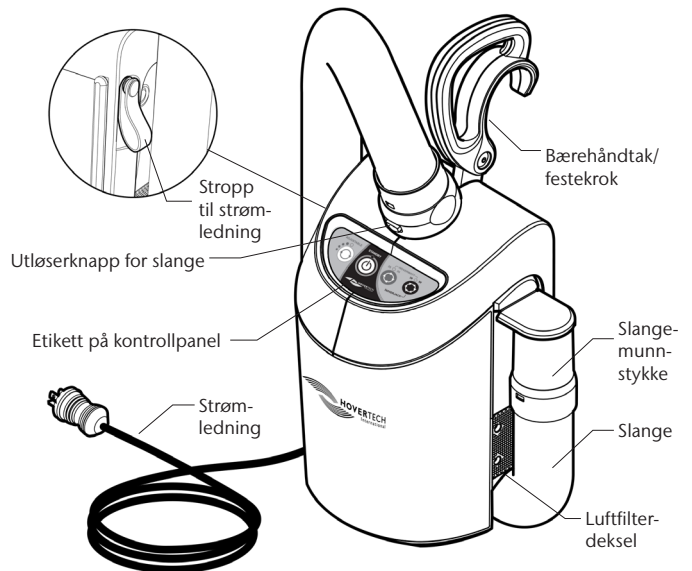

ADVARSEL: HT-Air er ikke kompatibel med likestrømforsyninger.

ADVARSEL: INGEN AV DELENE SKAL REPARERES AV BRUKEREN. Kun kvalifisert servicepersonell skal utføre reparasjoner på HoverTech International Air Supply.

Tastefunksjoner for Air Supply

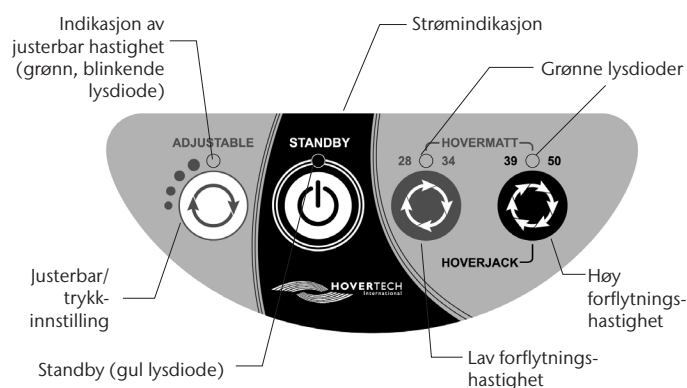

Tastefunksjonen ADJUSTABLE har fire forskjellige innstillinger. Hvert trykk på knappen øker lufttrykket og oppblåsingshastigheten. Den grønne, blinkende lysdioden angir oppblåsingshastigheten med antall blink (dvs. to blink tilsvarer oppblåsingshastighet nr. 2).



STANDBY: Brukes til å stoppe oppblåsing/luftstrømmen (gul lysdiode angir STANDBY-modus).

Bruksanvisning

1. Sjekk at de røde tømmeventilene er godt lukket før du begynner å blåse opp enheten.
2. Plasser Q2Roller på sengemadrassen, og midtstill den ved hjelp av midtlinjeangivelsen.
3. Brett festestykket på Q2Roller inn under sengemadrassen for å holde den på plass under bruk.
4. Fjern dekkfolien på de selvklebende stripsene på Q2R Pad, og plasser den midt på Q2Roller (hvis pasienten allerede er på madrassen, plasseres enheten og puten under pasienten med en rulleteknikk).
5. Sjekk at alle senge-/båreskinner er hevet, eller følg institusjonens protokoll, når pasienten er sentrert på enheten.
6. Finn oppblåsingsventilen på MOTSAIT side av den siden pasienten skal snus mot, og plasser slangen til Air Supply over ventilen. Trykk på ADJUSTABLE-knappen på kontrollpanelet til HT-Air for å starte luftstrømmen. Trykk om nødvendig på denne knappen opptil 4 ganger for å øke luftstrømmen og oppblåsingshastigheten.
7. Når pasienten er snudd, fjernes slangen fra ventilen. Trykk på STANDBY-knappen på kontrollpanelet til Air Supply for å stoppe luftstrømmen. Kammeret trenger kanskje ikke å blåses helt opp for å oppnå ønsket posisjon.
8. Ta den røde hetten av tømmeventilen for å tømme Q2Roller raskt. Trykk på midten av den svarte oppblåsingsventilen for å slippe ut luften eller justere kammeret langsomt.

Produktspesifikasjoner / nødvendig tilbehør

Q2ROLLER® LATERAL TURNING DEVICE

Materiale:	Polyuretan
Konstruksjon:	RF-sveiset
Bredde:	Kamre: 118 cm (46,5") (total kammerbredde) Festestykke: 183 cm (72")
Lengde:	Kamre: 113 cm (44,5") Festestykke: 112 cm (44")

LATEKSFRI

Modell: HTR -200
Pasientvektgrense: 272 kg
Skal brukes til kun én pasient

Q2R® PAD

Materiale:	Non-woven, pustende PE
Konstruksjon:	Termisk liming
Bredde:	99 cm (39")
Lengde:	99 cm (39")

Modell: HTR-CHX-5PACK (5 i hver)
Modell: HTR-CHX-CASE (50 i hver)

NØDVENDIG TILBEHØR:

Modell: HTAIR2300 (europeisk versjon) – 230 V~, 50 Hz, 6 A

Rengjøring og vedlikehold

RENGJØRING

Kan ikke vaskes i maskin. Q2Roller skal brukes til kun én pasient. Hvis den blir skitten, skal den desinfiseres ved å tørke av hele enheten med et bakteriedrepende rengjøringsmiddel (fenolbasert desinfeksjonsmiddel, kvaternær oppløsning eller et annet middels kraftig desinfeksjonsmiddel, i henhold til institusjonens prosedyrer). Følg produsentens anbefalte virketid og bruksanvisning for best mulig resultat. Påfør bakteriedrepende rengjøringsmiddel direkte på vanskelig tilgjengelige områder. La lufttørke.

INFEKSJONSKONTROLL

Q2R Pad anbefales for å dekke til Q2Roller slik at den ikke blir tilsmusset (kan kjøpes separat). Andre ting, som puter eller sengetøy, kan også legges på Q2Roller for å holde den ren.

Hvis Q2Roller brukes til en pasient på en isolasjonsavdeling, skal sykehuset bruke de samme protokollene/prosedyrene som de bruker for sengemadrassen og/eller sengetøyet i det aktuelle pasientrommet.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV AIR SUPPLY

Se håndboken for Air Supply.

MERK: SJEKK LOKALE/STATLIGE/FØDERALE/INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FØR KASSERING.

FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD

Før bruk skal Q2Roller inspiseres visuelt for å sjekke at det ikke finnes synlige skader som kan gjøre Q2Roller ubrukelig.

Q2Roller skal inspiseres regelmessig for å sikre at:

- Alle oppblåsningsventiler er selvtettende og uten tegn på lekkasje
- Det er ingen hull eller rifter i Q2Roller

Hvis det oppdages skade som kan føre til at Q2Roller ikke fungerer som den skal, skal Q2Roller kasseres.

HoverTech-symboler

 CE-SAMSVARSMERKE

 ÉN PASIENT – FLERGANGSBRUK

 FORSIKTIG

 ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR

 BRUKSANVISNING

 UNIK ENHETSIDENTIFIKATOR

 MEDISINSK UTSTYR

 MÅ HOLDES TØRR

 FUKTIGHETSBEGRENSNING

 TEMPERATURBEGRENSNING

 AUTORISERT REPRESENTANT

 PRODUSENT

 SERIENUMMER

 LOT-NUMMER

 HoverTech International
4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109
www.HoverMatt.com
Info@hovermatt.com

 CEpartner4U , ESDOORNLAAN
13, 3951DB MAARN,
NEDERLAND.
www.cepartner4u.com

Disse produktene samsvarer med standardene som gjelder for klasse 1-produkter i EU-forordning 2017/745 om medisinsk utstyr.

Hvis det oppstår bivirkninger i forbindelse med enheten, skal hendelsen rapporteres til vår autoriserte representant, CEPartner4u. CEPartner4u videregir informasjon til produsenten.

EU-importør:
Etac AB
Färögatan 33
S-164 51 Kista, Sverige
www.etac.com

For alle returer og reparasjoner, kontakt med din lokale forhandler/distributør:

Finn kontaktinformasjon for Europa:
www.etac.com