



Q2ROLLER®

Lateral Turning Device

Användarhandbok

Besök www.HoverMatt.com för andra språk

INNEHÅLL

Avsedd användning och försiktighetsåtgärder.....	2
Identifiering av delar – Q2Roller	2
Identifiering av delar – Air Supply	2
Funktioner hos Air Supply-panel.....	3
Bruksanvisning	3
Produktspecifikationer/tillbehör som krävs	3
Rengöring och underhåll	4

Avsedd användning och försiktighetsåtgärder

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Patienter som inte kan vända sig eller positionera sig i sidled.

KONTRAINDIKATIONER

Patienter med thoraxfrakturer, cervikala frakturer eller lumbalfrakturer som bedöms vara instabila.

AVSEDDA VÅRDMILJÖER

Sjukhus, långtidsvård eller äldreomsorg.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER


- Kontrollera att Q2Roller uppfyller patientens behov innan den används.
- Låt alltid minst två vårdgivare arbeta med Q2Roller.
- Se till att ventilerna inte är i kontakt med patienten när patienten ligger på Q2Roller.
- Produkten får endast användas av utbildad personal.
- Använd endast tillbehör som godkänts av HoverTech International.
- Använd Q2Roller enligt anvisningarna.

- Endast för användning med HT-Air-knappen för justering av luftförsörjning.
- Se till att patienten är centrerad på Q2Roller innan du blåser upp den. Indikator för referenscentrumlinje på Q2Roller.
- Vårdpersonalen måste se till att patienten hålls under uppsikt och stabiliseras under uppblåsning och tömning av Q2Roller, samt när den är uppblåst i en större vinkel än 30 grader.
- Får ej tvättas.
- Ytterligare bruksanvisningar finns i de olika produktspecifika användarhandböckerna.


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER – HOVERTECH INTERNATIONAL AIR SUPPLY

- Dra strömkabeln på ett sådant sätt att den inte löper risk att skadas.
- Undvik att blockera luftintagen till Air Supply-enheten.
- Använd endast produkten för det ändamål som beskrivs i denna handbok.
- **WARNING:** Undvik elstöt. Öppna inte Air Supply-enheten.

Identifiering av delar – Q2Roller

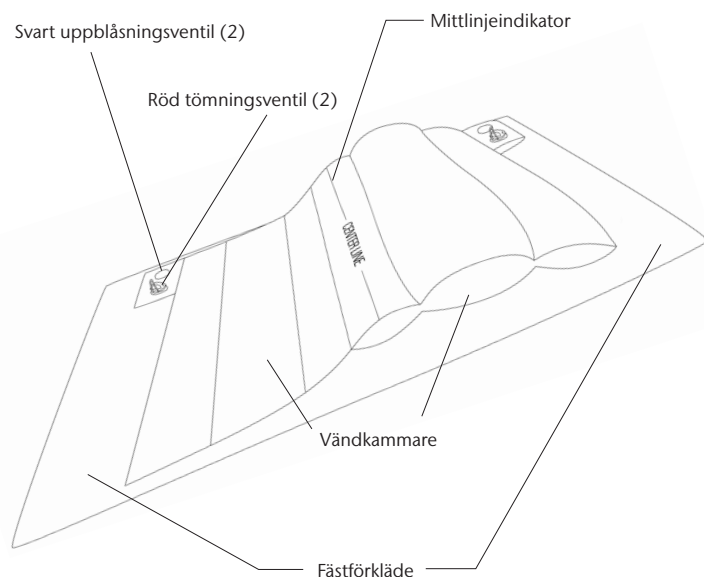


Identifiering av delar – Air Supply

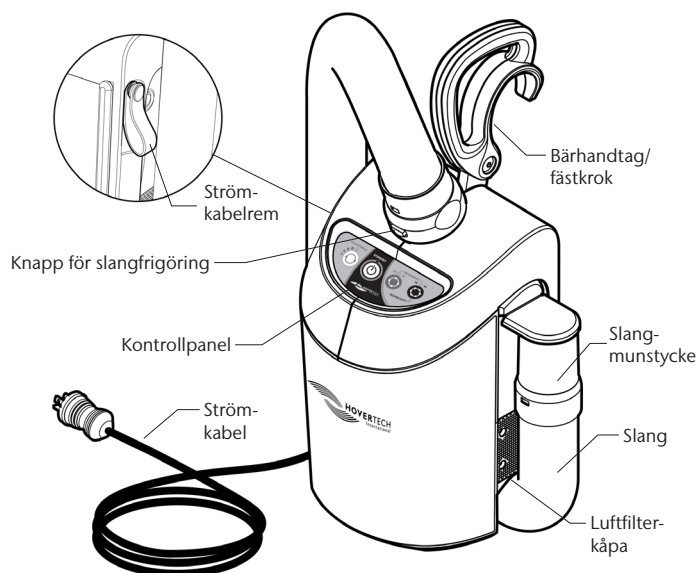

WARNING: HT-Air är inte kompatibel med likströmsförsörjning.

WARNING: INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN REPARERA. Endast kvalificerad servicepersonal får utföra reparationer på HoverTech International Air Supply.

Knappsatsfunktioner för Air Supply

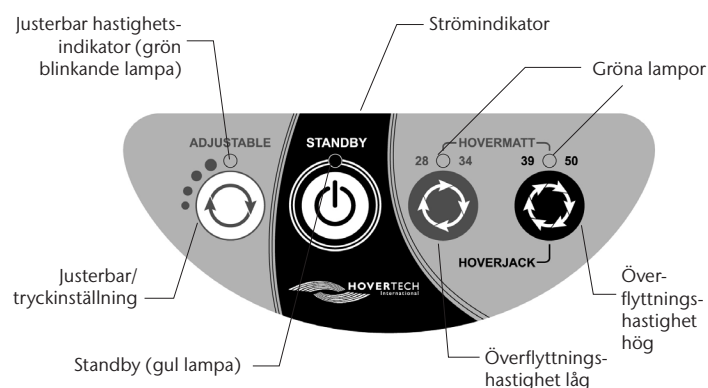

Knappen ADJUSTABLE har fyra olika inställningar. Varje tryck på knappen ökar lufttrycket och uppblåsningshastigheten. Den gröna blinkande lampan indikerar uppblåsningshastigheten genom antalet blinkningar (dvs. två blinkningar motsvarar uppblåsningshastighet 2).



STANDBY: Används för att stoppa uppblåsning/luftflöde (gul lampa indikerar STANDBY-läge).

Bruksanvisning

1. Se till att de röda tömningsventilerna är ordentligt förslutna innan uppblåsningen påbörjas.
2. Placera Q2Roller på sängmadrassen och centrera med hjälp av centrumlinjeindikatorn.
3. Stoppa in Q2Roller-skyddsförklädet under bäddmadrassen så att enheten hålls på plats under användning.
4. Ta bort skyddspapperet från de självhäftande remsorna på Q2R Pad och centrera den ovanpå Q2Roller (om patienten redan sitter på madrassen ska enheten och dynan placeras under patienten med hjälp av patientrullningsteknik).
5. Se till att patienten är centrerad på enheten och att alla säng-/bårramar är uppfällda, eller följ inrättningens rutiner.
6. Lokalisera uppblåsningsventilen på MOTSATTAN sidan av vridriktningen och placera luftmatningsslangen över ventilen. Tryck på knappen ADJUSTABLE på HT-Air-knappsatsen för att starta luftflödet. Tryck vid behov på denna knapp upp till 3 gånger till för att öka luftflödet och uppblåsningshastigheten.
7. När vändningen är klar tar du bort slangen från ventilen och trycker på STANDBY-knappen på Air Supply-knappsatsen för att stoppa luftflödet. Kammaren behöver kanske inte fyllas helt för att uppnå önskad position.
8. Ta bort det röda locket från tömningsventilen för att snabbt tömma Q2Roller. Tryck på mitten av den svarta uppblåsningsventilen för att långsamt tömma eller justera kammaren.

Produktspecifikationer/tillbehör som krävs

Q2ROLLER® LATERAL TURNING DEVICE

Material:	Polyuretan
Konstruktion:	RF-svetsad
Bredd:	Kammare: 118 cm (46,5") (sammanlagd kammarbredd) Förkläde: 183 cm (72")
Längd:	Kammare: 113 cm (44,5") Förkläde: 112 cm (44")

LATEXFRI

Modellnr: HTR-200
Patientens viktgräns: 272 kg
För enpatientsbruk

Q2R® PAD

Material:	Non-woven PE som andas
Konstruktion:	Termisk limning
Bredd:	99 cm (39")
Längd:	99 cm (39")

Modellnr: HTR-CHX-5PACK (5 st.)
Modellnr: HTR-CHX-CASE (50 st.)

TILLBEHÖR SOM KRÄVS:

Modellnr: HTAIR2300 (europeisk version) – 230 V ~, 50 Hz, 6 A

Rengöring och underhåll

RENGÖRING

Q2Roller är avsedd för enpatientsbruk. Om enheten blir smutsig ska den torkas av med ett bakteriedödande rengöringsmedel (fenoliskt desinfektionsmedel, kvartär lösning eller annat desinficeringsmedel på mellannivå enligt inrättningens rutiner) för desinficering. För bästa resultat, följ tillverkarens rekommenderade användningstid och instruktioner. Applicera bakteriedödande rengöringsmedel direkt på svåråtkomliga ställen. Låt lufttorka. Får ej tvättas.

INFEKTIONSKONTROLL

Q2R Pad rekommenderas för att täcka över Q2Roller så att enheten inte blir smutsig (finns även att köpa separat). Andra material, som dynor eller sängkläder, kan också placeras ovanpå Q2Roller för att hålla den ren.

Om Q2Roller används på en isolerad patient ska sjukhuset använda samma protokoll/procedurer som används för sängmadrassen och/eller för sängkläderna i patientrummet.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV AIR SUPPLY-ENHETEN

Se handboken till Air Supply-enheten för referens. Obs! KONTROLLERA LOKALA/STATLIGA/FEDERALA/INTERNATIONELLA RIKTLINJER FÖRE KASSERING.

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Före användning ska Q2Roller inspekteras visuellt för att säkerställa att det inte finns några synliga skador som kan göra Q2Roller obrukbar.

Q2Roller bör inspekteras regelbundet för att säkerställa följande:

- Alla uppblåsningsventiler är självtätande utan tecken på läckage
- Q2Roller har inga punkteringar eller revor

Om en skada upptäcks som gör att Q2Roller inte fungerar som den ska, ska Q2Roller kasseras.

HoverTech-symboler

 CE-MÄRKNING OM ÖVERENSSTÄMMELSE

 EN PATIENT – FLERA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

 FÖRSIKTIGHET

 ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING

 BRUKSANVISNING

 UNIK ENHETSIDENTIFIKATION

 MEDICINTEKNISK PRODUKT

 FÖRVARAS TORRT

 BEGRÄNSNING AV FUKTIGHET

 TEMPERATURGRÄNS

 AUKTORISERAD REPRESENTANT

 TILLVERKARE

 SERIENUMMER

 LOT-NUMMER

 HoverTech International
4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109, USA
www.HoverMatt.com
Info@hovermatt.com

Dessa produkter uppfyller de standarder som gäller för klass 1-produkter i förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.

 CEpartner4U, ESDOORNLAAN
13, 3951DB MAARN,
NEDERLÄNDERNA.
www.cepartner4u.com

Vid önskad incident i samband med enheten ska incidenterna rapporteras till vår auktoriserade representant, CEPartner4u. CEPartner4u vidarebefordrar informationen till tillverkaren.

EU-importör:
Etac AB
Färögatan 33
164 51 Kista www.etac.com

För returer och reparationer, kontakta din lokala återförsäljare/distributör:

Hitta kontaktuppgifter för Europa:
www.etac.com