



SITASSIST™ PRO

Positioneringsanordning

Bruksanvisning

MD

CE

Gå till www.HoverMatt.com för andra språk

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Symbolförklaring.....	2
Avsedd användning och förebyggande åtgärder.....	3
Beskrivning av delar – SitAssist™ Pro positioneringsanordning.....	4
Beskrivning av delar – HT-Air® Air Supply.....	4
Funktioner av HT-Air® Air Supply-knappsats.....	4
Bruksanvisning	5
Produktspecifikation/Nödvändiga tillbehör.....	6
Rengöring och förebyggande underhåll	6
Returer och reparationer.....	7

Symbolförklaring



CE-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄM-
MELSE



FRI FRÅN LATEX



UK-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄM-
MELSE



TILLVERKARE



AUKTORISERAD REPRESENTANT



TILLVERKNINGSDATUM



ANSVARIG PERSON I STORBRITAN-
NIEN



MEDICINSK UTRUSTNING



AUKTORISERAD REPRESENTANT I
SCHWEIZ



MODELLNUMMER



FÖRSIKTIGHET/VARNING



SERIENUMMER



MANUELL RENGÖRING



MASKINTVÄTTA INTE



AVFALLSHANTERING



UNIK ENHETSIDENTIFIERARE



IMPORTÖR



MAXIMAL PATIENTVIKT



DRIFTSINSTRUKTIONER

Avsedd användning och förebyggande åtgärder

AVSEDD ANVÄNDNING

SitAssist™ Pro positioneringsanordning används för att med tryckluftsteknik lyfta överkroppen på en patient från ryggläge till upprätt sittande position utan manuell ansträngning. Anordningen kan också användas för att lägga en patient från en upprätt sittande position till ryggläge utan manuell ansträngning. Anordningen är avsedd för patienter som behöver medelstor till måttlig assistans.

INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING

Den röntgentransparenta, MRI-kompatibla SitAssist Pro kan användas för patienter som behöver hjälp att uppnå en helt sittande, tillbakalutad och/eller ryggliggande position.

KONTRAIKATIONER

Patienter som upplever frakturer i bröstkorg, nacke eller ländrygg som bedöms som instabila ska inte använda HoverMatt om inte ett läkarbeslut har tagits i vårdinrättningen.

INSTÄLLNINGAR FÖR AVSEDD VÅRD

Sjukhus, anläggningar för långtidsvård/utökad vård, diagnostiska center.

Användning av radiologi (bildtagning), inklusive men inte begränsat till röntgen, MR, CT, fluoroskopi och ultraljud.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER – SITASSIST PRO

- Se till att SitAssist Pro uppfyller patientens behov innan du använder den.
En medicinsk bedömning bör utföras av en kvalificerad läkare innan patienter positioneras med hjälp av SitAssist Pro.
- Se till att patienten är centrerad på SitAssist Pro innan du blåser upp eller tömmer på luft.
- Stöd alltid patientens huvud när hon eller han sitter upp eller ligger ner.
- Vårdpersonalen måste se till att patienten får hjälp och stabiliseras när han eller hon sitter i SitAssist Pro.
- Mer än en vårdare kan behövas vid användning av SitAssist Pro.
- Produkten ska endast användas av utbildad personal.
- Använd endast de fästen och/eller tillbehör som är godkända av HoverTech.
- Anordningen kan periodvis behöva ytterligare luft för att bibehålla full uppblåsning.
- En vårdare måste alltid ta hand om patienten medan enheten är uppblåst.



För "helt vårdberoende patienter" krävs, förutom att vårdpersonalen hanterar SitAssist Pro och lufttillförseln, en särskild vårdare för att stödja patienten.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER – HOVERTECHS HTAIR AIR SUPPLY

- Använd den inte i närvaro av antändbara anestetika eller i en hyperbar kammare eller syretält.
- Dra nätsladden på så vis att den inte medför några risker.
- Se till att inte blockera luftintaget på Air Supply.
- Använd endast denna produkt för dess avsedda ändamål som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd din kliniks medicinska rutiner när du flyttar en patient på/av bordet.
- Vid användning av SitAssist Pro i MRI-miljö, behövs en 25 fots specialslang för MRI (kan köpas separat).



Undvik elektriska stötar. Öppna inte luftförsörjningen.




Läs bruksanvisningen för den särskilda produkten för ytterliga användarinstruktioner.




För användning med HoverTech HT-AIR. Använd inte Air200G eller Air400G.

Beskrivning av delar – SitAssist™ Pro positioneringsanordning

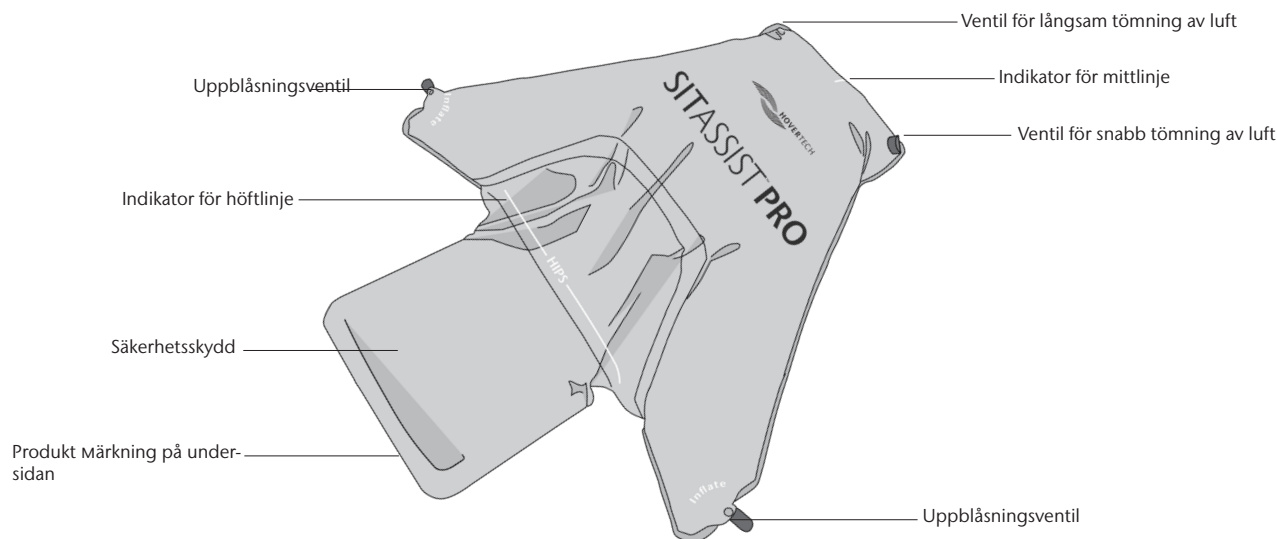


Beskrivning av delar – HT-Air® Air Supply

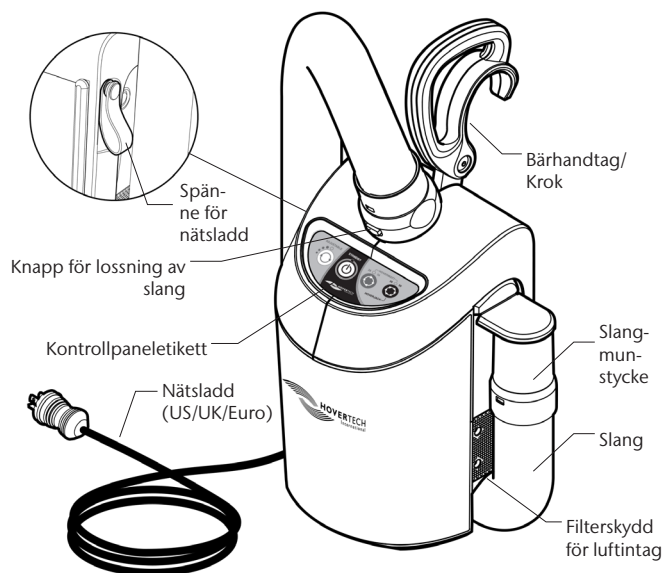

WARNING: HT-Air är inte kompatibel med nätaggreat med likspänning.
HT-Air är inte avsedd för användning med Hoverjack Battery Cart.

Funktioner av HT-Air® Keypad

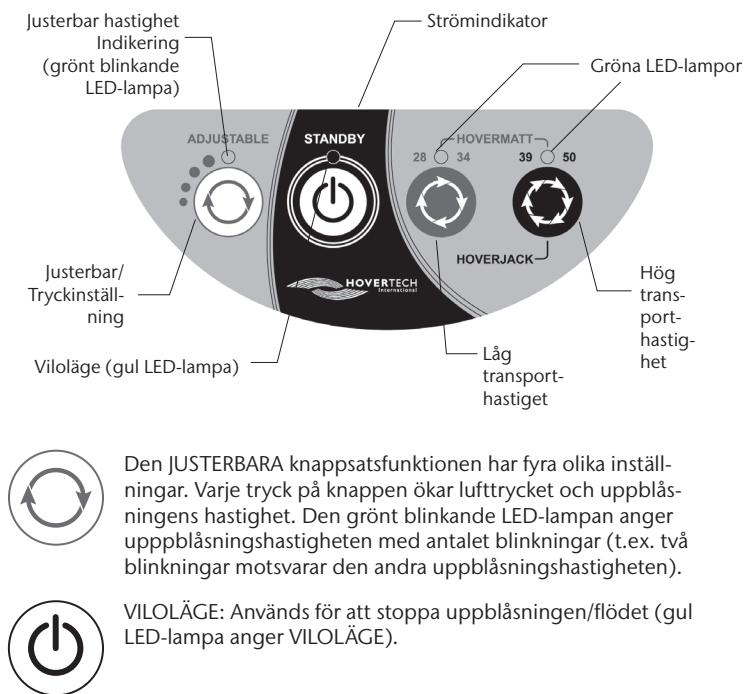


Bruksanvisning

Lägga patienten ner:

1. Centrera SitAssist Pro på underlaget med sidan med loggan vänd uppåt. Kontrollera att båda luftningsventilerna är stängda.



2. Använd HT-AIR Air Supply och sätt in slangmunstycket i en av de två uppblåsningsventilerna som sitter nära patientens höft på sidorna av anordningen. Fäst snäpplåset för att säkra slangen till anordningen.

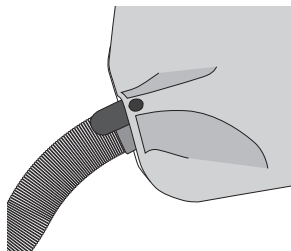

3. Tryck på 34" HoverMatt-knappen för att blåsa upp anordningen.




4. När anordningen är helt uppblåst trycker du på STANDBY-knappen för att stoppa luftflödet. Ta bort slangen om det behövs.



5. Centrera patienten på SitAssist Pro med hjälp av centreringslinjen och rikta in patientens höfter mot enhetens kant med hjälp av höftplaceringslinjen.



6. Töm SitAssist Pro på luft (se alternativ för tömning nedan) för att sänka patienten från sittande ställning till liggande läge och stöd patientens huvud under tömningen.

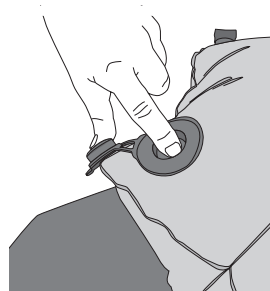

7. För tömning på luft:

- a) Öppna den genomskinliga tömningsventilen och tryck ned den inre klaffen. Anordningen töms gradvis och långsamt på luft.
- b) För en snabb tömning på luft, öppna det röda ventillocket för snabb tömning. Anordningen töms snabbt på luft.



Sätta patienten upprätt:

OBSERVERA: Om patienten redan ligger på en yta, använd rullningsteknik för att placera anordningen under patienten. Se till att säkerhetskyddet är utsträckt och ligger plant under patienten.

1. Centrera SitAssist Pro på underlaget med loggan vänd uppåt. Kontrollera att båda luftningsventilerna är stängda.




2. Centrera patienten på SitAssist Pro med hjälp av centreringslinjen och rikta in patientens höfter mot anordningens neder kant med hjälp av höftplaceringslinjen.




3. För att säkerställa att den tömda anordningen inte stör den medicinska utrustningen under procedurer, vik vingarna inåt mot patienten och säkra patienten vid bordet med ett standardiserat patientspännband, om det behövs.


4. Efter bildtagning, använd en HT-AIR Air Supply, och sätt in slangmunstycket i en av de två uppblåsningsventiler som finns nära patientens höft. Fäst snäpplåset för att säkra slangen till anordningen.

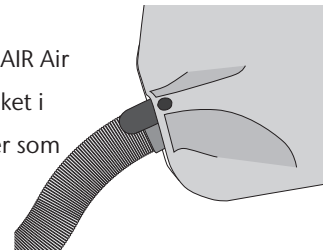


5. Tryck på knappen ADJUSTABLE (justerbar) på air supply upp till fyra gånger för att gradvis blåsa upp enheten. Se till att patienten är centrerad och blås upp den helt genom att trycka på 34" HoverMatt-knappen. Stöd patientens huvud när patienten flyttas till sittande ställning.

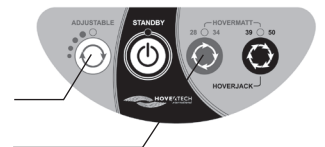

6. När anordningen är helt uppblåst trycker du på STANDBY-knappen för att stoppa luftflödet. Ta bort slangen.

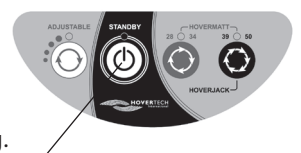

7. För att tömma enheten på luft när patienten har flyttats, öppna det röda ventillocket för snabb tömning.

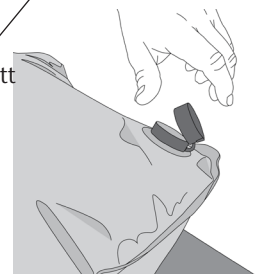

Produktspecifikation/Nödvändiga tillbehör

SITASSIST PRO POSITIONERINGSANORDNING

Material:	210D nylonpresenning: 0,13 mm klar eter; dubbel TPU-laminering
Konstruktion:	RF-svetsad
Bredd:	48 tum (121 cm)
Längd:	53,5 tum (136 cm) with skydd

Modellnummer: SAP-200



Max: 600 LBS/ 272 KG

NÖDVÄNDIGA TILLBEHÖR: AIR SUPPLY

Modellnummer: HTAIR1200 (Nordamerikas variant) – 120 V~, 60 Hz, 10 A
Modellnummer: HTAIR2300 (Europas variant) – 230 Vac, 50 Hz, 6 A

YTTERLIGARE TILLBEHÖR: 25' MRI-SLANG

Modellnummer: HTA-MRI (varje) – för HT-AIR

Rengöring och förebyggande underhåll

Mellan användning för olika patienter ska SitAssist Pro torkas av med en rengöringslösning som används av ditt sjukhus för desinfektion av medicinsk utrustning. En 10:1 blekningslösning (10 delar vatten: en del blekningsmedel) eller desinfektionsdukar kan också användas. Det är viktigt att följa bruksanvisningen från tillverkaren av rengöringsmedlet, t.ex. när det gäller behandlingstid och mättnad.

OBSERVERA: Rengöring med blekningslösning kan missfärga tyg.



Maskintvätta inte SitAssist Pro.

INFEKTIONSKONTROLL

Ett lakan kan läggas över SitAssist Pro för att hålla den ren.

Om SitAssist Pro används för en isolerad patient ska sjukhuset använda samma protokoll/rutiner som används för bäddmadrassen och/eller sängkläder i patientrummet.

FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Före användning ska en visuell inspektion utföras på SitAssist Pro för att säkerställa att det inte finns några synliga skador som skulle göra SitAssist Pro oanvändbar.

SitAssist Pro ska periodiskt inspekteras för att säkerställa följande:

- Att det inte finns några sprickor eller hål som kan hindra SitAssist Pro från att blåsa upp sig.
- Att locken för både den långsamma och snabba tömningsventilen är fästa med tamparna och är säkrade.
- Att tryckknapparna till uppblåsningsventilen är i funktionsdugligt skick.

Om någon skada upptäcks som gör att SitAssist Pro inte fungerar som avsett ska SitAssist Pro tas ur bruk och returneras till HoverTech för reparation.



När produkten når slutet på sin livslängd, ska den tas isär efter typ av material så att delarna kan återvinnas eller kasseras korrekt i enlighet med lokala krav.

Transport och lagring

Denna produkt kräver inte några särskilda lagringsvillkor.

Returer och reparationer

Alla produkter som returneras till HoverTech måste ha ett RGA-nummer (Returned Goods Authorization (Auktorisering för returnerade varor)) som utfärdas av företaget. Ring (800) 471-2776 och fråga efter en medlem av RGA-teamet som utfärdar ett RGA-nummer. Alla produkter som skickas tillbaka utan ett RGA-nummer kommer att ha längre reparationstid.

Returnerade produkter ska skickas till:

HoverTech
Attn: RGA # _____
4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

För europeiska företag, skicka produkter du vill returnera till:



Attn: RGA # _____
Kista Science Tower
SE-164 51 Kista, Sverige

För produktgarantier, gå till vår webbplats:
<https://hovermatt.com/standard-product-warranty/>



HoverTech

4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109
www.HoverMatt.com
Info@HoverMatt.com

Dessa produkter överensstämmer med standarderna som tillämpas för klass 1-produkter i förordningen om medicintekniska produkter (EU) 2017/745.



CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13,
3951DB MAARN, THE NETHERLANDS.

www.cepartner4u.com



Etac Ltd.

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

www.etac.com/uk



TapMed Swiss AG

Gumprechtstrasse 33
CH-6376 Emmetten
CHRN-AR-20003070

www.tapmed-swiss.ch

I fall av oönskade händelser avseende produkten ska denna händelse rapporteras till vår auktoriserade representant. Våra auktoriserade representanter skickar informationen till tillverkaren.



4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

800.471.2776
Fax 610.694.9601

www.HoverMatt.com
Info@HoverMatt.com