



HOVERMATT® PROSWedge™

Avlastningssystem för ompositionering av patient

Bruksanvisning

MD

CE

Gå till www HoverMatt.com för andra språk

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| | |
|---|-----|
| Symbolförklaring | 2 |
| Avsedd användning och förebyggande åtgärder | 3 |
| Beskrivning av delar – HoverMatt PROSWedge..... | 4 |
| HoverMatt PROSWedge Produktspecifikationer..... | 4 |
| Användarinstruktioner | 5-6 |
| Rengöring och förebyggande underhåll..... | 6 |
| Returer och reparationer | 7 |

HOVERMATT[®] PROSWedge™ bruksanvisning

Symbolförklaring



CE-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄM-
MELSE



FRI FRÅN LATEX



UK-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄM-
MELSE



PARTINUMMER



AUKTORISERAD REPRESENTANT



TILLVERKARE



ANSVARIG PERSON I STORBRITAN-
NIEN



TILLVERKNINGSDATUM



AUKTORISERAD REPRESENTANT I
SCHWEIZ



MEDICINSK UTRUSTNING



FÖRSIKTIGHET/VARNING



SERIENUMMER



AVFALLSHANTERING



ENSKILD PATIENT – FLERFALDIG AN-
VÄNDNING



FOTÄNDE



MASKINTVÄTTA INTE



DRIFTSINSTRUKTIONER



UNIK ENHETSIDENTIFIERARE

Avsedd användning och förebyggande åtgärder

AVSEDD ANVÄNDNING

HoverMatt PROSWedge är en komponent i HoverMatt[®] PROS[™] (Patient Repositioning Off-Loading System eller Avlastningssystem för ompositionering av patient) som hjälper vårdpersonalen att positionera patienten. Vändning av patienten och placering av kilar minskar trycket på benuskott och underlättar följsamheten till Q2. Kilen ger en 30 graders vridvinkel för patienter med risk för trycksador. HoldFast[™]-skummet håller kilen korrekt placerad under patienten och på plats i sängen för att minska risken för att patienten glider. HoverMatt PROSWedge kan också användas med alla HoverMatt[®]-madrasser för engångsbruk eller HoverSling[®] Repositioning Sheet.

INDIKATIONER

- Patienter som behöver Q2-vändning för tryckavlastning av benuskott.
- Patienter med nedsatt hudfunktion.

KONTRAINDIKATIONER

- Använd inte till patienter vars medicinska tillstånd kontraindicerar vändning.

INSTÄLLNINGAR FÖR AVSEDD VÅRD

- Sjukhus, långtidsinrättningar eller inrättningar för förlängd vård.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER – HOVERMATT PROSWEDGE

- För positioneringsuppgifter som sker i sängen kan fler än en vårdgivare användas.
- Använd endast denna produkt för dess avsedda ändamål som beskrivs i denna bruksanvisning.



Sidskenor måste lyftas med en vårdgivare.




Placera inte HoverMatt PROSWedge i ett örngott för att bibehålla den halkfria effekten av HoldFast[™].

HOVERMATT[®] PROSWedge[™] bruksanvisning

Beskrivning av delar – HoverMatt PROSWedge


Illustrationen visar korrekt riktning på kilarna.

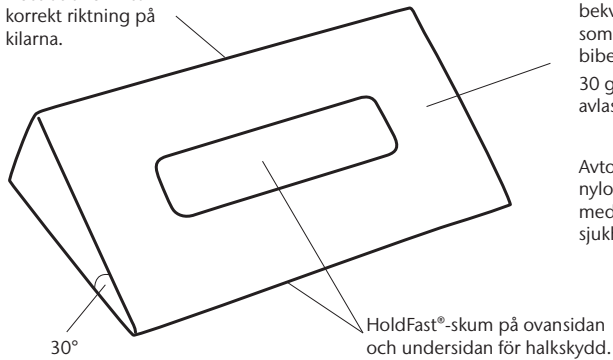

Omslutande skum anpassar sig bekvämt efter patienten samtidigt som den vridna positionen bibehålls.
30 graders vinkel för korrekt avlastning.

Avtorkningsbart nylonmaterial – kompatibelt med desinfektionsmedel för sjukhus.

Illustrationen visar korrekt riktning på kilarna.

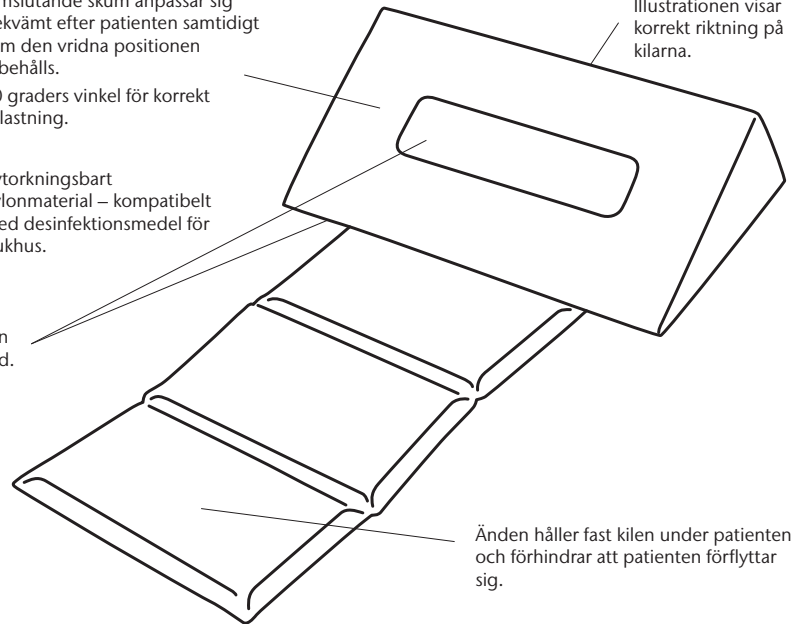

Produktegenskaper

HOVERMATT PROSWEDGE

| | |
|----------------------|---|
| Material: | 70D kalandrerad polyester HoldFast [™] högfriktionsskum |
| Konstruktion: | Sydd |
| Bredd: | 16" (40,6 cm) |
| Längd: | 29,75 tum (75,6 cm) med ände. 11,75 tum (29,8 cm) utan ände. |

Modellnummer: PROS-W (par kilar utan ände, komprimerade) – 5 par per kartong

Modellnummer: PROS-W (par kilar med/utan ände, komprimerade) – 5 par per kartong



Instruktioner för användning med HoverMatt® PROS™, HoverMatt® eller HoverSling®

INFÖRING AV KILAR FÖR ATT VÄNDA PATIENTEN MED LUFTASSISTANS (ENSAM VÅRDARE)

1. Centrera patienten på HoverMatt eller HoverSling, med remmen/remmarna bortkopplade. Hög sidskenorna på motsatt sida av sängen som patienten ska vändas mot. Sängen ska vara i ett plant läge.
2. Placera lufttillförseln i närheten för enkelhetens skull. För in slangen i madrassens fotända och starta luftflödet genom att välja lämplig knapp för storleken på den produkt som används.
3. När den är helt uppblåst skjuter du patienten i motsatt riktning mot vändningen. Skjut dem så nära sängkanten som möjligt för att säkerställa att de är centrerade på sängen när patienten flyttas.
4. Placera HoverMatt PROSWedge med pilarna uppåt i rätt riktning mellan HoverMatt eller HoverSling och sängytan. Identifiera korsbenets läge och använd klinisk bedömning för att placera kilen/kilarna. Se till att den bakre delen av kilen är upphöjd tills positionen är inställd och sänk sedan ned kilen för att säkra den på plats med HoldFast™-skummet. Placera en kil under korsbenet och den andra kilen en handsbredd ovanför den lägre kilen.
5. Om en kil med ände används ska änden föras in under patientens lår och kilen placeras under korsbenet. Dra igenom änden till den andra sidan av patienten för att fästa kilen på plats. Placera den andra kilen utan ände en handsbredd ovanför den nedre kilen för att stödja patientens överkropp.
6. När patienten har flyttats trycker du på STANDBY-knappen för att stoppa luftflödet. Kontrollera kilarnas placering genom att placera handen mellan kilarna och kontrollera att korsbenet inte vidrör sängen. Hög sängens huvudända efter önskemål och kontrollera korsbenet igen. Hög sidskenorna eller följ vårdinrättningens rutiner.

OBS: Lyft båda sidskenorna innan förflyttning till motsatt sida av sängen medan madrassen är uppblåst. Sidskenorna kan sänkas igen när ytterligare uppgifter utförs.

PLACERING AV KILAR MED LUFTASSISTERADE MADRASSER – NEDTRYCKNINGSMETODEN (2 VÅRDARE)

1. Centrera patienten på HoverMatt eller HoverSling, med remmen/remmarna bortkopplade. Sängen ska vara i ett plant läge.
2. Placera lufttillförseln bredvid vårdaren på motsatt sida av vändriktningen. För in slangen i madrassens fotända och starta luftflödet genom att välja lämplig knapp för storleken på den produkt som används.
3. När sängen är helt uppblåst, flytta patienten i motsatt riktning mot vridningen, så nära sängkanten som möjligt för att säkerställa att patienten är centrerad på sängen vid ompositionering.
4. För att lägga patienten på sidan trycker vårdaren längst bort från patienten försiktigt ned HoverMatt eller HoverSling vid patientens axel och höft, medan den vändande vårdaren försiktigt drar handtagen uppåt. När patienten har vänts på sidan stannar vårdaren som patienten är vänd mot kvar hos patienten medan vårdaren som vänder patienten trycker på STANDBY-knappen för att stoppa luftflödet. Den vårdare som stödjer patienten kan hålla i handtagen på HoverMatt eller HoverSling medan den andra vårdaren placerar kilarna.
5. Placera HoverMatt PROSWedge mellan HoverMatt eller HoverSling och sängytan med patientsidan vänd uppåt. Klinisk bedömning bör användas vid positionering av kilar. Se till att den bakre delen av kilen är upphöjd tills positionen är inställd och sänk sedan ned kilen för att säkra den på plats med HoldFast™-skummet. Lokalisera korsbenet och placera en kil under korsbenet. Placera den andra kilen en handsbredd ovanför den nedre kilen för att stödja patientens överkropp. Om du använder bakre kilen, för in bakre kilen under patientens lår för att fästa kilen under korsbenet.
6. Sänk ner patienten på kilarna och se till att remmarna inte sitter under HoverMatt eller HoverSling. Om du använder änden på kilen, dra änden genom patientens andra sida tills den är spänd. Kontrollera kilarnas placering genom att placera handen mellan kilarna och kontrollera att korsbenet inte vidrör sängen. Hög sängens huvudända efter önskemål och kontrollera korsbenet igen. Hög sidskenorna eller följ vårdinrättningens rutiner.

KILPLACERING MED TAKLYFT ELLER PORTABEL LYFT (ENSAM VÅRDARE)

1. Vid användning med alla HoverMatt- eller HoverSling-produkter kan en taklyft eller bärbar lyft användas för att vända patienten och placera HoverMatt PROSWedge.
2. Hög sidskenorna på motsatt sida av sängen som patienten ska vändas mot. Se till att patienten är centrerad och för patienten i motsatt riktning mot vändningen med antingen en rygglyftsteknik (se HoverSling-bruksanvisningen) eller luftassisterad teknik enligt beskrivningen ovan. Detta gör att patienten kan centreras i sängen när han eller hon flyttas över på kilarna.
3. Fäst axel- och höftöglorna (HoverSling) eller axel- och höftbanden (HoverMatt) i hängstången som ska vara parallell med sängen. Hög hissen för att initiera svängen.
4. Placera HoverMatt PROSWedge mellan HoverMatt (eller HoverSling) och sängytan med patientsidan vänd uppåt. Klinisk bedömning bör användas vid positionering av kilar. Se till att den bakre delen av kilen är upphöjd tills positionen är inställd och sänk sedan ned kilen för att säkra den på plats med HoldFast™-skummet. Lokalisera korsbenet och placera en kil under korsbenet. Placera den andra kilen en handsbredd ovanför den nedre kilen för att stödja patientens överkropp. Om du använder bakre kilen, för in bakre kilen under patientens lår för att fästa kilen under korsbenet.
5. Sänk ner patienten på kilarna och se till att remmarna inte sitter under HoverMatt eller HoverSling. Om du använder änden på kilen, dra änden genom patientens andra sida tills den är spänd. Kontrollera kilarnas placering genom att placera handen mellan kilarna och kontrollera att korsbenet inte vidrör sängen. Hög sängens huvudända efter önskemål och kontrollera korsbenet igen.

HOVERMATT® PROSWedge™ bruksanvisning

PLACERING AV KILAR – INGEN LUFT (2 VÅRDARE)

1. För användning med den luftfria HoverMatt® PROS™ eller HoverMatt® PROS™ lyftsele, se till att patienten är centrerad och skjut patienten i motsatt riktning mot vändningen för att säkerställa att det finns utrymme för vändningen med patienten centrerad i sängen vid ompositionering. Vänd patienten manuellt med hjälp av vändhandtagen eller lyftselens remmar och använd en god ergonomisk hållning.
2. Placera HoverMatt PROSWedge mellan HoverMatt eller HoverMatt PROS Sling och sängytan med patientsidan vänd uppåt. Klinisk bedömning bör användas vid positionering av kilarna. Se till att den bakre delen av kilen är upphöjd tills positionen är inställd och sänk sedan ned kilen för att säkra den på plats med HoldFast™-skummet. Lokalisera korsbenet och placera en kil under korsbenet. Placera den andra kilen en handsbredd ovanför den nedre kilen för att stödja patientens överkropp. Om du använder kilen med ände, för in änden under patientens lår för att säkra kilen på plats.
3. Sänk ner patienten på kilarna och se till att remmarna inte sitter under HoverMatt PROS eller HoverMatt PROS Sling. Om du använder änden på kilen, dra änden genom patientens andra sida tills den är spänd. Kontrollera kilarnas placering genom att placera handen mellan kilarna och kontrollera att korsbenet inte vidrör sängen. Höj sängens huvudända efter önskemål och kontrollera korsbenet igen. Höj sidskenorna eller följ vårdinrättningens rutiner.

Rengöring och förebyggande underhåll



HOVERMATT PROSWEDGE RENGÖRINGSANVISNINGAR

För engångsbruk.

När HoverMatt PROSWedge är smutsig ska den torkas av med desinfektionsservetter eller en rengöringslösning som används av ditt sjukhus för desinfektion av medicinsk utrustning. Låt lufttorka före användning.



Maskintvätta inte eller torka i torktumlare.



FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Före användning ska en visuell inspektion utföras på HoverMatt PROSWedge för att säkerställa att det inte finns några synliga skador som skulle göra den oanvändbar. Om någon skada upptäcks som gör att systemet inte fungerar som avsett, ska HoverMatt PROSWedge tas ur bruk och kasseras.

INFEKTIONSKONTROLL

HoverMatt PROSWedge för enpatientsbruk eliminerar risken för korskontaminering och behovet av maskintvätt.



När produkten når slutet på sin livslängd, ska den tas isär efter typ av material så att delarna kan återvinnas eller kasseras korrekt i enlighet med lokala krav.

Transport och lagring

Denna produkt kräver inte några särskilda lagringsvillkor.

Returer och reparationer

Alla produkter som returneras till HoverTech måste ha ett RGA-nummer (Returned Goods Authorization (Auktorisering för returnerade varor)) som utfärdas av företaget.

Ring (800) 471-2776 och fråga efter en medlem av RGA-teamet som utfärdar ett RGA-nummer. Alla produkter som skickas tillbaka utan ett RGA-nummer kommer att ha längre reparationstid.

Returnerade produkter ska skickas till:

HoverTech
Attn: RGA # _____
4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

För europeiska företag, skicka produkter du vill returnera till:



Attn: RGA # _____
Kista Science Tower
SE-164 51 Kista, Sverige

För produktgarantier, gå till vår webbplats:

<https://hovermatt.com/standard-product-warranty/>




HoverTech

4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

www.HoverMatt.com
Info@HoverMatt.com

Dessa produkter överensstämmer med standarderna som tillämpas för klass 1-produkter i förordningen om medicintekniska produkter (EU) 2017/745.

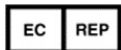

CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13,
3951DB MAARN, THE NETHERLANDS.

www.cepartner4u.com



Etac Ltd.

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

www.etac.com/uk



TapMed Swiss AG

Gumprechtstrasse 33
CH-6376 Emmetten
CHRN-AR-20003070

www.tapmed-swiss.ch

I fall av oönskade händelser avseende produkten ska denna händelse rapporteras till vår auktoriserade representant. Våra auktoriserade representanter skickar informationen till tillverkaren.



4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

800.471.2776
Fax 610.694.9601

www.HoverMatt.com
Info@HoverMatt.com